

## Betten und Zubehör

für die häusliche Pflege

Wohnmöbelprogramm Residenz



# Inhalt

## Allgemeine Informationen

- |   |                                       |    |  |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 4 | Das Unternehmen Burmeier              | 9  | Übersicht der Pflegebetten und Einlegerahmen |
| 6 | Sicherheitsstandards für Pflegebetten | 12 | Technische Daten                             |
| 7 | Das 24-Volt-Antriebssystem            |    |  |

## Pflegebetten und Einlegerahmen

- |    |                        |    |                           |
|----|------------------------|----|---------------------------|
| 17 | Economic II            | 45 | Betteinsatz Lippe IV      |
| 21 | Dali II 24 Volt        | 49 | Betteinsatz Lippe 120/140 |
| 25 | Dali-Wash              | 53 | Gigant                    |
| 29 | Arminia III 24 Volt    | 57 | Inovia                    |
| 33 | Allura-II-Serie        | 61 | Regia                     |
| 37 | Westfalia IV           | 65 | Westfalia-Klassik         |
| 41 | Dali-Low Entry 24 Volt | 69 | Seniorenbett Relax        |

## Weitere Produkte

- |    |                            |    |                    |
|----|----------------------------|----|--------------------|
| 75 | Zubehör                    | 89 | Kastenmöbel        |
| 79 | Geteilte Seitensicherungen | 93 | Stühle             |
| 81 | Ravello                    | 95 | Dekore             |
| 85 | Nachttische                | 96 | Hilfsmittelnummern |

# Produkte mit Herz und Verstand



„Produkte mit Herz und Verstand“ – diese Philosophie bestimmt die tägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Burmeier. Das Unternehmen im ost-westfälischen Lage/Lippe ist seit Jahren Marktführer bei Pflegebetten im Bereich der häuslichen Pflege in Deutschland. Die technisch innovativen und langlebigen Produkte von Burmeier genießen durch ihren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard weltweit Ansehen und Akzeptanz.

Seit 1995 ist Burmeier in der heutigen Ausrichtung eine weitere erfolgreiche Tochtergesellschaft in der

Stieglmeyer-Gruppe. Gemeinsam können die Unternehmen auf eine mehr als 115-jährige Erfahrung in der Produktion und im Vertrieb von Klinik- und Pflegebetten sowie Zubehör zurückblicken. Getreu dem Motto „Produkte mit Herz und Verstand“ steht immer der Gedanke im Vordergrund, den pflegebedürftigen Menschen das Leben zuhause so angenehm wie möglich zu gestalten und den pflegenden Angehörigen ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Die vereinte Innovationskraft der Unternehmensgruppe entwickelt zukunftsweisende Technologien in allen Be-

reichen der Pflege. Dazu zählen zum Beispiel digitale Assistenzsysteme sowie unterschiedliche Seitensicherungskonzepte, die den pflegebedürftigen Menschen mehr Sicherheit und Freiheit bieten und zugleich die Mobilisierung nachhaltig unterstützen.

Wohnliches Design, hohe Funktionalität und schnelle Verfügbarkeit der Burmeier-Produkte sind entscheidende Argumente für den medizinischen Fachhandel. Eine nahezu permanente Verfügbarkeit aller Artikel, ein hoher Lagerbestand und ein zuverlässiges Logistikkonzept sichern bundesweite Lieferzeiten von

nur 24 bis 48 Stunden. Burmeier verwendet baugleiche Teile in mehreren Modellen – auch dies stellt einen nachhaltigen Mehrwert im Beschaffungsmanagement und in der Organisation für den Fachhandel dar.

Für jeden Bedarfsfall das richtige Bett: Das beschreibt die generelle Ausrichtung der Unternehmensgruppe. Ein günstiges Einstiegsbett findet sich ebenso in diesem Katalog wie Schwerlast- und Niedrigbetten. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie Produkte von Burmeier die häusliche Pflege leichter und das Leben angenehmer gestalten.



Burmeier gehört seit 1995 zur Stieglmeyer-Gruppe



Hochmotivierte Mitarbeiter bilden ein kundenorientiertes Team



Burmeier-Produkte werden weltweit verkauft



Das Dali II 24 Volt ist das meistverkaufte Pflegebett in Deutschland



Das Dali-Wash für maschinelle Aufbereitung sichert optimale Hygiene



Digitale Assistenzsysteme werden ständig weiterentwickelt

**Alle Betten sind serienmäßig auf größtmögliche Sicherheit ausgelegt.**

**Dazu zählen:**

- Primärsicherung, elektronische Überlastabschaltung und Thermosicherung gegen Überhitzung
- Schutzkleinspannung zum Betrieb von Motoren
- hausinterne Qualitätsstandards, die über Normanforderungen hinausgehen
- Zugentlastung mit Knickschutz am Bettrahmen und am Motorengehäuse
- mindestens IPX4-Spritzwasserschutz

**Folgende Normen und Richtlinien werden angewandt:**

- Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
- DIN EN 62353: Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- DIN EN 12182: Technische Hilfen für behinderte Menschen
- DIN 32977: Behindertengerechtes Gestalten
- DIN EN 60601-1: Medizinische elektrische Geräte – Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- DIN EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-1-6: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
- DIN EN 60601-2-52: Medizinische elektrische Geräte – Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten
- DIN EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte



24-Volt-Antriebssystem mit elektronischem Schaltnetzteil (SwitchMode) direkt an der Steckdose im Netzsteckergehäuse integriert

**Vorteile:**

- keine 230-Volt-Netzanschlussleitung
- keine weitere Ableitstrommessung während der laut Gebrauchsanweisung zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus
- erste Prüfung hat der Hersteller bereits vorgenommen
- auch in Verbindung mit Doppelantrieben und OpenBus-Antriebssystem lieferbar
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- geringer Stromverbrauch
- höchste Sicherheit für den Pflegebedürftigen
- keine 230-Volt-Komponenten am Pflegebett
- kein Elektromog
- Pflegebett stromlos
- durch ein unabhängiges Prüfinstitut geprüft

Gern senden wir Ihnen eine individuelle Bestätigung für Ihr Haus zu.



## Pflegebetten und Einlegerahmen



**Economic II –**  
Das preiswerte Pflegebett



**Dali II 24 Volt –**  
Das wirtschaftliche Pflegebett

### Vorteile & Sicherheit für den Anwender/ Bewohner:

- Das Netzteil mit dem Trafo ist direkt im Netzsteckergehäuse integriert. Das macht das System kompakt und es gibt keine störenden Komponenten auf dem Boden.
- Durch die Transformation im Netzsteckergehäuse arbeitet das System ausschließlich mit Schutzkleinspannung und es gibt keinerlei 230-Volt-Komponenten in der direkten Bewohnerumgebung.
- Auf diese Weise entsteht kein Elektrosmog am Pflegebett, was für bessere Umgebungsbedingungen sorgt und andere Geräte oder auch Herzschrittmacher nicht stört.
- Die Schutzkleinspannung bietet mehr Sicherheit für den Pflegebedürftigen und für den Betreiber.
- Das Pflegebett ist bei Nichtbenutzung des Handschalters stromlos. Das senkt den Stromverbrauch deutlich.
- Der Handschalter ist ergonomisch geformt. Seine Funktionen lassen sich für den Bewohner einzeln sperren oder freigeben.
- Die zuverlässigen Linak-Antriebssysteme sind robust und optional auch mit OpenBus-Antriebssystem lieferbar.

### Prozesskostenoptimierung:

- Der Aufbau des Bettes ist besonders einfach. Auch der elektrische Anschluss ist durch das einfache Stecksystem fehlersicher.
- Es ist keine elektrisch unterwiesene Person (EUP) vor Ort erforderlich. Das ermöglicht eine bessere Tourenplanung und reduziert die Personal- und Fortbildungskosten.
- Die Inspektion und Funktionsprüfung erfolgt unter Einhaltung der 2-%-Regelung mindestens alle 2 Jahre. Eine elektrische Prüfung ist dabei nicht erforderlich.
- Die Ableitstrommessung des Antriebssystems wird bereits vor Auslieferung durchgeführt, sodass die geprüften Pflegebetten sofort einsatzbereit sind. Danach ist während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes laut Gebrauchsanweisung und darüber hinaus keine weitere elektrische Überprüfung notwendig.
- Diese Prüfbedingungen bringen automatisch weniger Aufwand mit sich und bedeuten eine Reduzierung der Prüfmittelkosten und der Prüfgerätekosten.
- Die Verwendung gleicher Antriebskomponenten bei anderen Pflegebetten mit 24-Volt-Antriebssystem vereinfacht die Handhabung und bietet eine bessere Fehleranalyse.
- Aufbau und Wartung basieren auf einem einfachen, eindeutigen und robusten Stecksystem, sodass die Arbeit vor Ort deutlich vereinfacht wird.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2015, Version 4.



**Dali-Wash –** Das maschinenwaschbare Pflegebett



**Arminia III 24 Volt –**  
Das praktische Pflegebett im wohnlichen Design



**Allura-II-Serie –** Die innovativen Pflegebetten, auch für schwergewichtige Bewohner

Gern senden wir Ihnen eine individuelle Bestätigung für Ihr Haus zu.

## Pflegebetten und Einlegerahmen



**Westfalia IV** –  
Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit



**Dali-Low Entry 24 Volt** – Das Pflegebett mit  
einer niedrigen Einstiegshöhe von 22 cm



**Inovia** –  
Das Pflegebett mit innovativen Ideen



**Regia** –  
Das Pflegebett mit vielen Optionen



**Betteinsatz Lippe IV** – Zum Einbau in ein vorhandenes Bett



**Westfalia-Klassik** – Das Pflegebett mit besonderen Eigenschaften



**Betteinsatz Lippe 120/140** – Die praktische  
Alternative zum Schwerlastbett



**Gigant** – Das Pflegebett für schwergewichtige  
Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht



**Seniorenbett Relax** –  
Das kombinierbare Wunsch-Seniorenbett

# Technische Daten Pflegebetten und Einlegerahmen

Modellbezeichnung		Economic II	Dali II 24 Volt	Dali-Wash	Arminia III 24 Volt	Allura II 100   120	Westfalia IV	Dali-Low Entry 24 Volt
<b>Verstellungen</b>								
Höhe	elektrisch	●	●	●	●	●	●	●
Rückenlehne	elektrisch	●	●	●	●	●	●	●
Oberschenkellehne	elektrisch	●	●	●	●	●	●	●
Sperreinrichtung	selektiv	●	●	●	●	●	●	●
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-	-
24-Volt-Antriebssystem		-	●	●	●	●	●	●
<b>Höhenverstellbereich</b>								
von - bis		40-80	40-80	40-80	40-80	30-80	35 - 80	22-62
<b>Liegefläche 4-geteilt</b>								
Standard		90x200	90x200	90x200	90x200	100   120x200	90x200	90x200
LF-Sonderbreiten		-	-	-	-	-	80   100	-
Metallstreben		-	○	●	○	-	○ <sup>2)</sup>	●
Metallgitterboden		-	-	-	-	●	-	-
Federholzleisten		●	●	-	●	-	●	-
Komfortliegefläche		-	-	-	-	-	-	-
einteilig		-	-	-	-	-	-	-
teilbar		●	●	●	●	●	●	●
LF-Schwenkung einstellbar		●	●	●	●	●	-	●
auswandernde Rückenlehne		-	-	-	-	-	-	-
Lifterunterfahrbarkeit		●	●	●	●	●	●	●
<b>Rollenfeststellung</b>								
zentral		-	-	-	-	-	-	-
achsweise		-	-	-	-	-	-	-
einzel		●	●	●	●	●	●	●
Rollen-Durchmesser		100	100	100	100	100	125	75
<b>Außenabmessungen und Gewicht</b>								
Länge		218	218	218	220	223   223	212	224
Breite		101	101	101	101	111   131	100	101
Nettogewicht		97	97	97	106	118   128	136	106
<b>Sichere Arbeitslast</b>								
Angaben in kg		185	185	185	185	250	185	175

Änderungen vorbehalten ● Lieferstandard ○ optional gegen Mehrpreis - nicht lieferbar  
<sup>1)</sup> nur in Verbindung mit Rundstollen und Dekor Buche Natur <sup>2)</sup> nur 90 x 200 cm

Modellbezeichnung		Lippe IV	Lippe 120   140	Gigant	Inovia Inovia 100	Regia	Westfalia-Klassik
<b>Verstellungen</b>							
Höhe	elektrisch	●	●	●	●	●	●
Rückenlehne	elektrisch	●	●	●	●	●	●
Oberschenkellehne	elektrisch	●	●	●	●	●	●
Sperreinrichtung	selektiv	●	●	●	●	●	●
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-
24-Volt-Antriebssystem		●	●	-	●	●	●
<b>Höhenverstellbereich</b>							
von - bis		29-74	29-74	40-80	22-77	26-80	35-80
<b>Liegefläche 4-geteilt</b>							
Standard		90   100 190   200	120   140x200	120x200	90x200   100x200	90x200	90x200
LF-Sonderbreiten		80	-	-	-	100 <sup>1)</sup>	-
Metallstreben		-	●	-	●	●	●
Metallgitterboden		-	-	●	-	-	-
Federholzleisten		●	-	-	-	-	-
Komfortliegefläche		-	-	-	○	○	-
einteilig		-	-	●	●	●	●
teilbar		●	●	-	-	-	-
LF-Schwenkung einstellbar		-	-	●	●	●	-
auswandernde Rückenlehne		-	-	-	●	●	●
Lifterunterfahrbarkeit		-	-	●	●	●	●
<b>Rollenfeststellung</b>							
zentral		-	-	-	-	○	●
achsweise		-	-	-	●	●	-
einzel		-	-	●	-	-	-
Rollen-Durchmesser		-	-	100	100	50	100
<b>Außenabmessungen und Gewicht</b>							
Länge		185   195	195	222	220	210	212
Breite		85   95	115   135	135	105   115	100	101
Nettogewicht		80	132   140	159	135   150	135	115
<b>Sichere Arbeitslast</b>							
Angaben in kg		200	250	350	225	225	200

Änderungen vorbehalten ● Lieferstandard ○ optional gegen Mehrpreis - nicht lieferbar  
<sup>1)</sup> nur in Verbindung mit Rundstollen und Dekor Buche Natur <sup>2)</sup> nur 90 x 200 cm

# Technische Daten Pflegebetten und Einlegerahmen


Modellbezeichnung	Economic II	Dali II 24 Volt	Dali-Wash	Arminia III 24 Volt	Allura II 100   120	Westfalia IV	Dali-Low Entry 24 Volt
<b>Holzumbau</b>							
Standard	-	-	-	-	-	●	-
modellbezogenes Kopfteil geschlossen	-	-	-	●	-	-	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen	-	-	-	●	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste	-	-	-	-	-	-	-
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste	-	-	-	-	-	-	-
Comodo mit Rundstollen	-	-	-	-	-	○	-
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil	-	-	-	-	-	○	-
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil	-	-	-	-	-	-	-
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dekor</b>							
Buche Natur <sup>4)</sup>	●	●	●	●	●	●	●
Königsahorn <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Kirsche Havanna <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Kirsche Edel	-	-	-	-	-	-	-
Bella Noce Schoko <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Magnolia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zubehör</b>							
Schaumlederbezug	○	○	○	○	○	○	○
Serviertablett	○	○	○	○	○   -	○	○
aufsteckbarer SG-Holm	○	○	○	○	-	-	-
drehbarer Handlauf	○	○	-	○	-	-	-
Kojenbrett	-	-	-	-	-	-	-
Leselampe Sola	○	○	○	○	○	○	○
Bettverlängerung 20 cm	○	○	○	○	○	○	-
Rastomat für Unterschenkellehne	○	○ <sup>6)</sup>	●	●	●	●	●
Aufnahmeschale	○	○	○	○	○	○	○
Journalhalter	-	-	-	-	○	○	-
Geberhalter für Handschalter	○	○	○	○	-	○	○
Handschalter-Verlängerungskabel	-	○	○	○	-	○	○
Füllpolster	○	○	○	○	○	○	○
Bettzeugablage	-	-	-	-	-	-	-
Wandabweisrollen	○	○	○	○	○	○	○
Zusatzfüllung (Holzverkleidung)	○	○	-	-	○	-	○
Aufrichter inkl. Triangelgriff	●	●	●	●	●	●	●
Aufstehhilfe	○	○	-	○	○	○	○
durchgehende Seitensicherung	●	●	●	●	●	●	●
teleskopierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
adaptierbare Seitensicherung	○	○	-	○	-	○	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
Lippe-Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
Lager- und Transporthilfe	●	●	●	●	●	-	●
Verbreiterungsschiene 5 cm	-	-	-	-	-	-	-
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	-	-	-	-	-	-	-
Softcover	○	○	○	○ <sup>7)</sup>	-	-	-

Änderungen vorbehalten ● Lieferstandard ○ optional gegen Mehrpreis - nicht lieferbar  
<sup>3)</sup> fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low <sup>4)</sup> erhältlich für Seniorenbett Relax <sup>5)</sup> nur in Verbindung mit Haupt Lito  
<sup>6)</sup> in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig <sup>7)</sup> nur für Seitensicherungen

Modellbezeichnung	Lippe IV	Lippe 120   140	Gigant	Inovia Inovia 100	Regia	Westfalia-Klassik
<b>Holzumbau</b>						
Standard	-	-	-	-	●	●
modellbezogenes Kopfteil geschlossen	-	-	●	●	-	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen	-	-	●	○	-	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste	-	-	-	○	-	-
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste	-	-	-	●	-	-
Comodo mit Rundstollen	-	-	-	-	○	○
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil	-	-	-	-	-	○
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil	-	-	-	-	○	-
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste	-	-	-	-	○ <sup>3)</sup>	-
<b>Dekor</b>						
Buche Natur <sup>4)</sup>	-	-	●	●	●	●
Königsahorn <sup>4)</sup>	-	-	-	○	○	-
Kirsche Havanna <sup>4)</sup>	-	-	-	○	○	-
Kirsche Edel	-	-	-	○	○	-
Bella Noce Schoko <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-
Magnolia	-	-	-	-	-	○ <sup>5)</sup>
<b>Zubehör</b>						
Schaumlederbezug	-	-	○	○	○	○
Serviertablett	-	-	-	○	-	○
aufsteckbarer SG-Holm	-	-	○	-	-	-
drehbarer Handlauf	-	-	-	-	-	-
Kojenbrett	-	-	-	○	○	-
Leselampe Sola	○	○	○	○	○	○
Bettverlängerung 20 cm	-	○	○	○ (TSG: 27 cm)	○ (27 cm)	○
Rastomat für Unterschenkellehne	●	●	●	●	●	●
Aufnahmeschale	-	-	○	○	○	○
Journalhalter	-	-	-	-	○	○
Geberhalter für Handschalter	○	-	-	-	-	○
Handschalter-Verlängerungskabel	○	-	-	-	-	○
Füllpolster	-	-	○ (nur DSG)	○ (nur DSG)	-	○
Bettzeugablage	-	-	-	-	○	-
Wandabweisrollen	-	-	-	○	○	○
Zusatzfüllung (Holzverkleidung)	-	-	-	-	-	-
Aufrichter inkl. Triangelgriff	○	○	●	○	○	●
Aufstehhilfe	○	○	-	-	-	-
durchgehende Seitensicherung	-	-	●	●	-	●
teleskopierbare Seitensicherung	-	-	-	○	●	-
adaptierbare Seitensicherung	○	-	-	-	-	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	○	-	-	-
Lippe-Seitensicherung	○	-	-	-	-	-
Lager- und Transporthilfe	○	-	-	-	-	-
Verbreiterungsschiene 5 cm	○	-	-	-	-	-
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	○	○	-	-	-	-
Softcover	-	-	-	-	-	-

Änderungen vorbehalten ● Lieferstandard ○ optional gegen Mehrpreis - nicht lieferbar  
<sup>3)</sup> fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low <sup>4)</sup> erhältlich für Seniorenbett Relax <sup>5)</sup> nur in Verbindung mit Haupt Lito  
<sup>6)</sup> in Verbindung mit Metallstreben-Liegefläche serienmäßig <sup>7)</sup> nur für Seitensicherungen

## Pflegebetten und Einlegerahmen

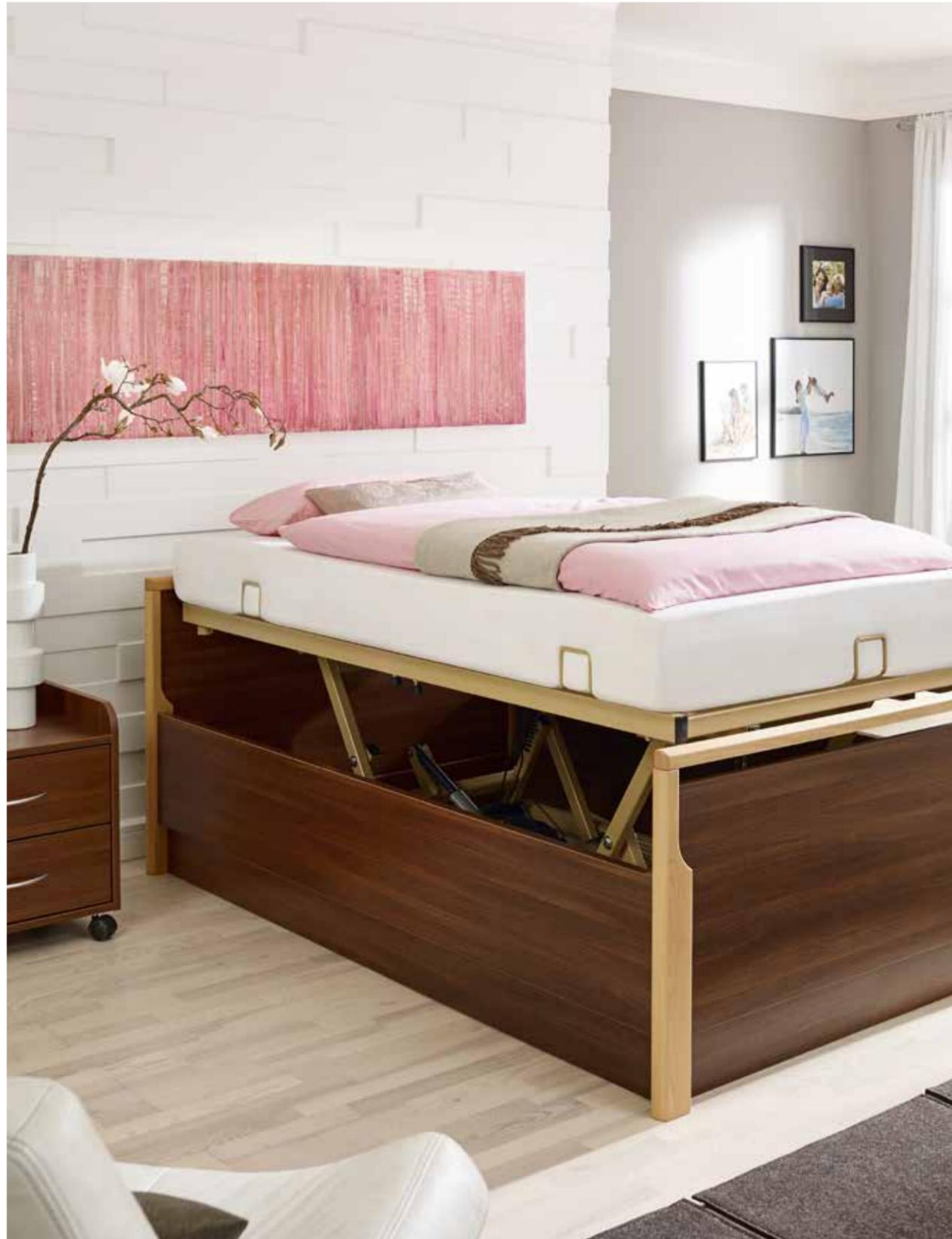

## Economic II

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das preiswerte Pflegebett

## Economic II - Das preiswerte Pflegebett

Äußerst stabile Seiten-  
sicherungskonstruktion

Handschalter mit  
selektiver Sperrfunktion

Seitensicherungsschutzhöhe  
von 37 cm



185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Wartungsarmes und langlebiges  
LINAK-Antriebssystem

Hochwertige und robuste  
TENTE-Qualitätsrolle

Unterfahrbarkeit mit allen  
handelsüblichen Liftern

### Ihre Vorteile

#### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Economic II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

#### Wirtschaftlichkeit/Einfache Montage durch eine Person

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie. Das Pflegebett ist durch eine Person ohne Werkzeug montier- und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten.

#### Seitensicherungsschutzhöhe von 37 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 15 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

### Details



Fußtieflagerung



Unterschenkellehne  
durch Rastomat  
anhebbar  
(Zubehör gegen  
Mehrpreis)



Platzsparende  
Auslieferung und  
Lagerung auf  
Lager-/Transport-  
hilfe



Handschalter  
mit selektiver  
Sperrfunktion

# Pflegebett **Economic II**

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von ca. 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 12/2016, Version 5, Artikel-Nr. 600636.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Softcover



Serviertablett



Holzverkleidung für das Fahrgestell (auch nachträglich montierbar)



Unterschenkellehne durch Rastomat anhebbar (auch nachträglich montierbar)



Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Links: aufsteckbarer Seitensicherungsholm  
Rechts: drehbarer Handlauf



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

51.0714.33 Pflegebett **Economic II** (Holzseitensicherungen), Länge 218 cm, Breite 101 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Dali II 24 Volt

Clinic | Care | **Homecare** | Assist




# Dali II 24 Volt - Das wirtschaftliche Pflegebett

Äußerst stabile Seitensicherungs-konstruktion

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

Seitensicherungsschutzhöhe von 37 cm

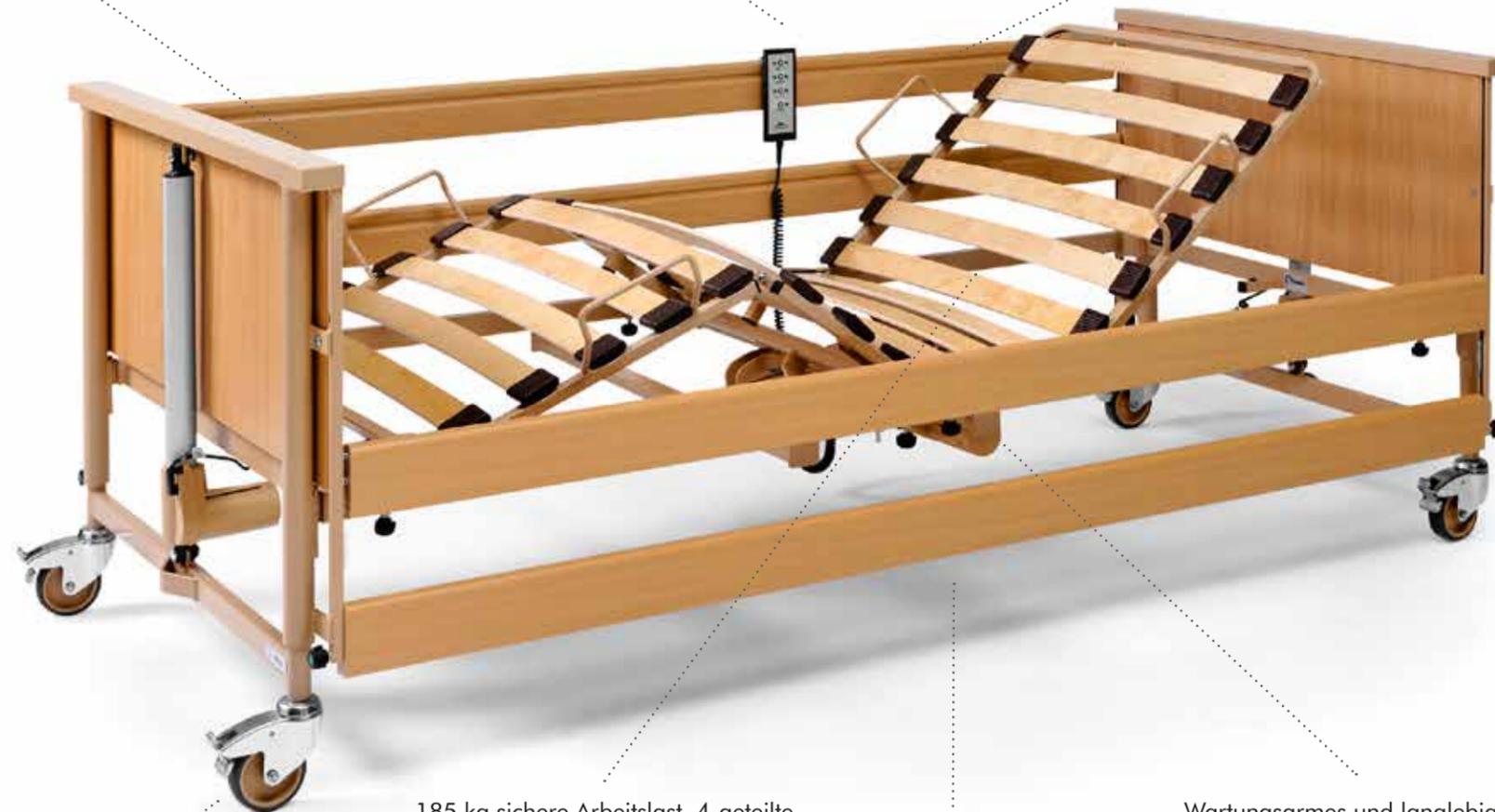

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Wartungsarmes und langlebiges LINAK-Antriebssystem

Hochwertige und robuste TENTE-Qualitätsrolle

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Dali II 24 Volt“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### Wirtschaftlichkeit/Einfache Montage durch eine Person

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie. Das Pflegebett ist durch eine Person ohne Werkzeug montierbar und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Seitensicherungsschutzhöhe von 37 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 15 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

## Details



Fußtieflagerung



Dali II mit Metallseiten-sicherungen (Modell 15.0624.11)



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebochse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe

# Pflegebett Dali II 24 Volt

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 12/2016, Version 5, Artikel-Nr. 600633.



## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Softcover



Serviertablett



Liegefläche mit Metallstreben, Unterschenkellehne manuell einstellbar



Holzverkleidung für das Fahrgestell (auch nachträglich montierbar)



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholme (auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Links: aufsteckbarer Seitensicherungsholm  
Rechts: drehbarer Handlauf



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

51.0624.33 Pflegebett **Dali II 24 Volt** (Holzseitensicherungen), Länge 218 cm, Breite 101 cm

15.0624.11 Pflegebett **Dali II 24 Volt** (Metallseitensicherungen)

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Dali-Wash

Clinic | Care | **Homecare** | Assist




Das maschinenwaschbare Pflegebett

# Dali-Wash - Das maschinenwaschbare Pflegebett

Äußerst stabile Seiten-  
sicherungskonstruktion

Handschalter mit  
selektiver Sperrfunktion

Seitensicherungsschutz-  
höhe von 37 cm

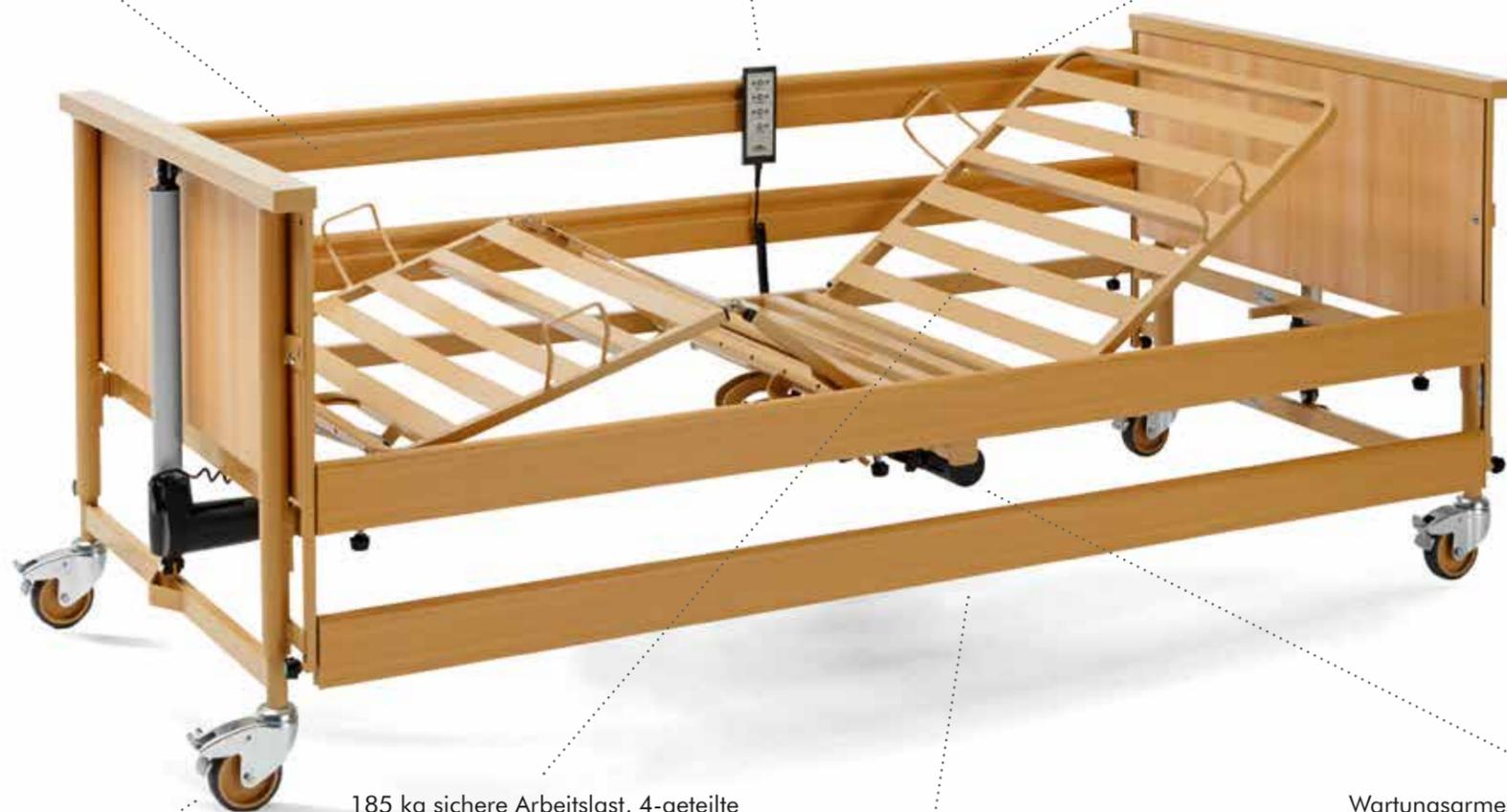

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Wartungsarmes und langlebiges  
LINAK-Antriebssystem

Hochwertige und robuste  
TENTE-Qualitätsrolle

Unterfahrbarkeit mit allen  
handelsüblichen Liftern

## Ihre Vorteile

### Maschinelle Reinigung

Das Pflegebett „Dali-Wash“ ist für die Reinigung in Waschanlagen konzipiert. Durch seine KTL-Beschichtung von außen und von innen ist das Bett bestens gegen Korrosion geschützt. Die speziellen Bohrungen sorgen dafür, dass mögliche Restflüssigkeit nach dem Waschvorgang vollständig ablaufen kann. Die Gewährleistung bleibt hierbei vollständig erhalten. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett.

### Besonders hoher Hygienestandard

Durch den maschinellen Waschprozess bietet das Pflegebett „Dali-Wash“ kontinuierlich einen besonders hohen Hygienestandard. Das spart gegenüber der manuellen Reinigung Zeit und auch Kosten. Gleichzeitig erhöht dies die Sicherheit für den Pflegebedürftigen und den Angehörigen erheblich. Das Sanitätshaus demonstriert damit sein besonders verantwortungsvolles Handeln.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

## Details



Seitensicherungs-  
holme mit  
Abschlusskappen  
zum Schutz vor  
eindringender  
Feuchtigkeit



Metalloberflächen  
von innen und  
außen versiegelt,  
somit dauerhaft  
gegen Korrosion  
geschützt



Kunststoff-Stopfen  
mit Bohrungen für  
den Austritt von  
Restfeuchtigkeit



Rohrprofile mit  
Bohrungen für  
den Austritt von  
Restfeuchtigkeit



Feuchtigkeits-  
beständige  
MDF-Füllung  
in den Kopf-  
und Fußteilen

# Pflegebett **Dali-Wash**

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2017, Version 5, Artikel-Nr. 600635.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Softcover



Serviertablett



Liegefläche mit Metallstreben, Unterschenkellehne manuell einstellbar



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholme (auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Aufsteckbarer Seitensicherungsholm



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

51.0824.23 Pflegebett **Dali-Wash** (Holzseitensicherungen), Länge 218 cm, Breite 101 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Arminia III 24 Volt




Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das praktische Pflegebett

# Arminia III 24 Volt - Das praktische Pflegebett im wohnlichen Design

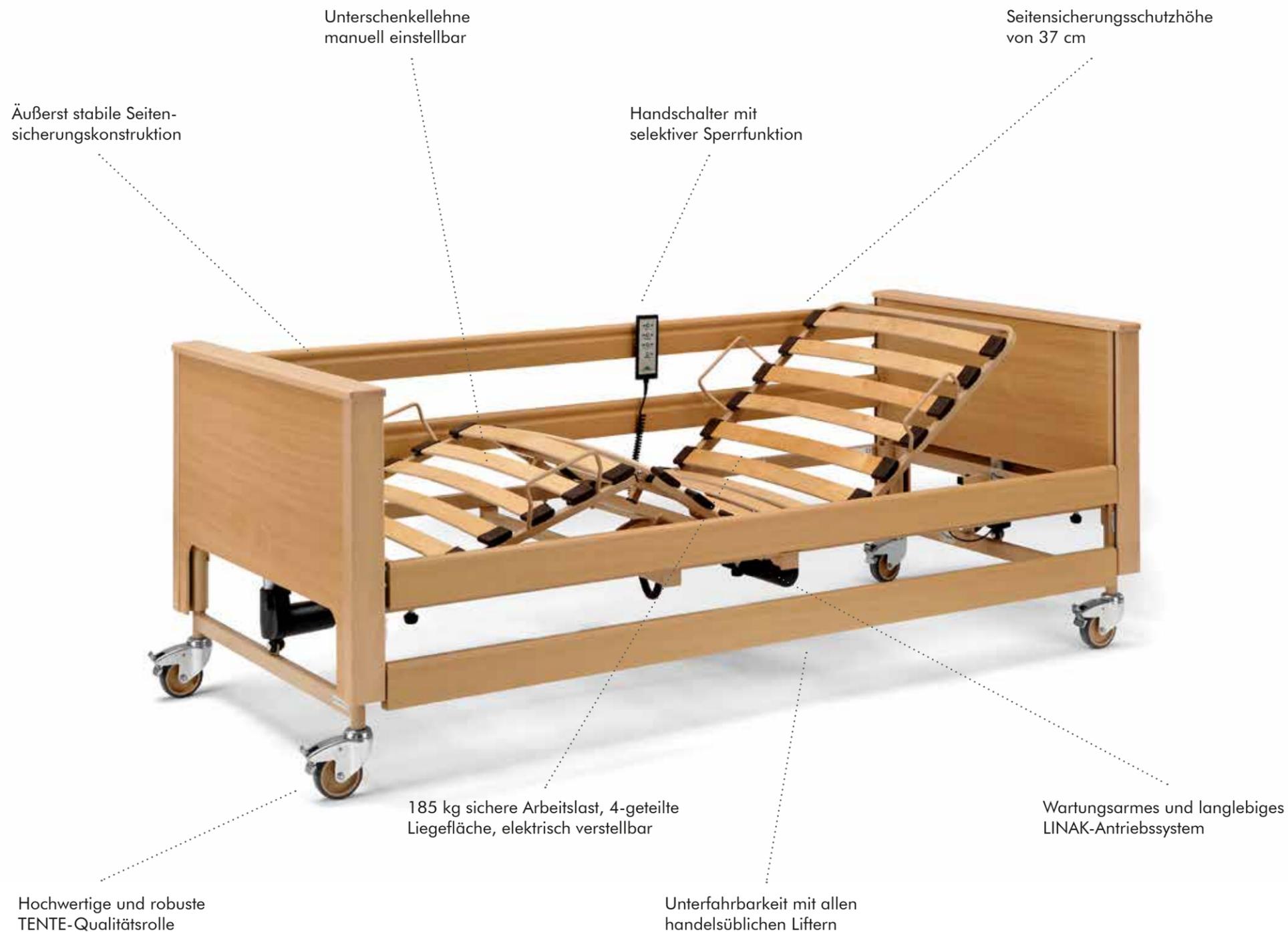

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Arminia III 24 Volt“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Der Holzbau vermittelt ein wohnliches Ambiente. Ein Bett, in dem sich der Bewohner sehr wohl fühlt.

### Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Seitensicherungsschutzhöhe von 37 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 15 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

## Details



Fußtieflagerung



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

# Pflegebett **Arminia III 24 Volt**

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilhauben in Buche Dekor/Buche massiv
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2016. Version 6. Artikel-Nr. 600632.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis  
lieferbar)



Adaptierbare Seitensicherung



Liegefläche mit Metallstreben



Serviertablett



Bettverlängerung inkl.  
Seitensicherungsholme  
(auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Links: aufsteckbarer Seiten-  
sicherungsholm  
Rechts: drehbarer Handlauf



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

51.3424.33 S Pflegebett **Arminia III 24 Volt**, Länge 220 cm, Breite 101 cm


19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)




# Allura II

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

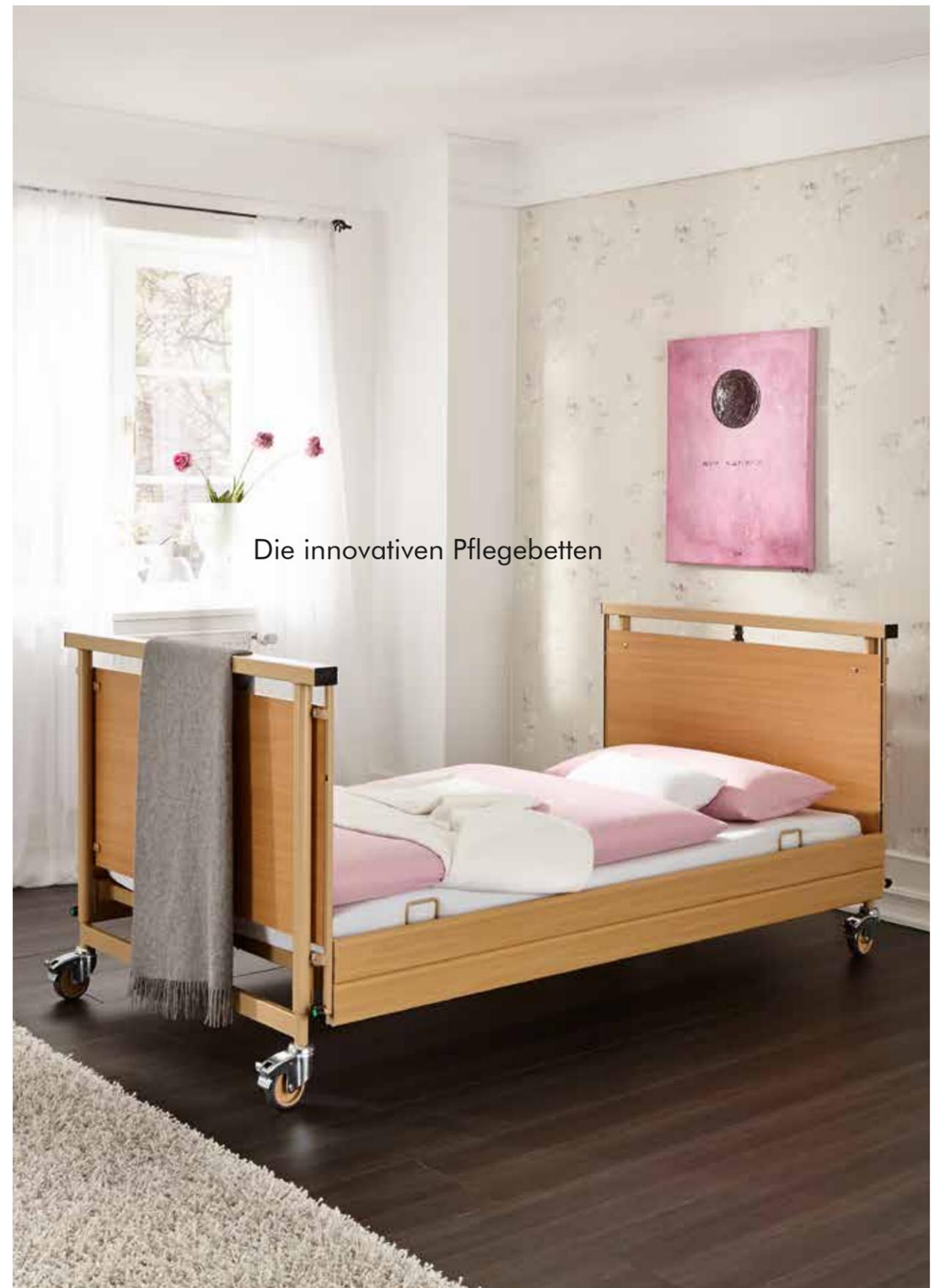

Die innovativen Pflegebetten

# Allura II - Die innovativen Pflegebetten, auch für schwergewichtige Patienten

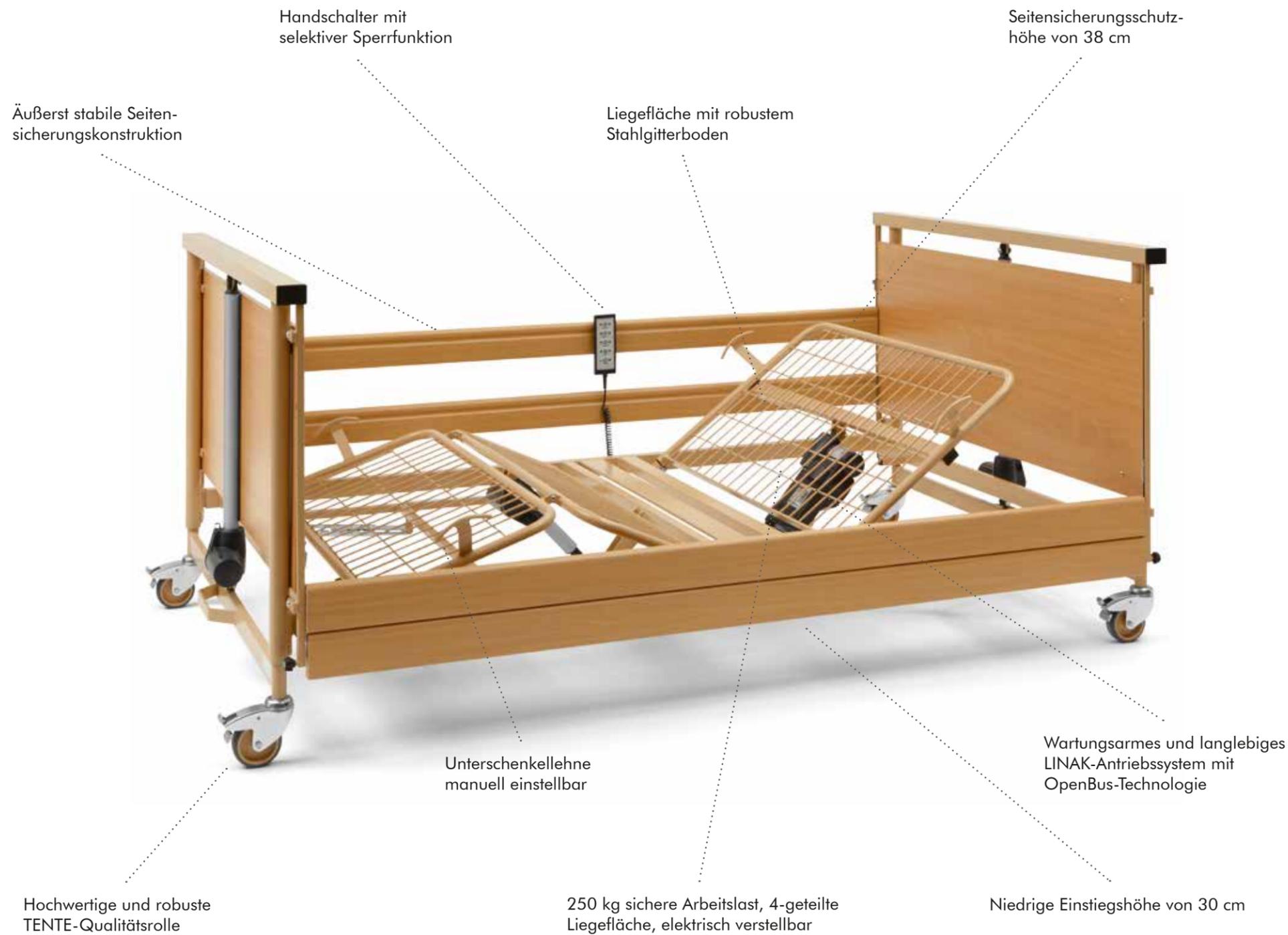

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Allura II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### Niedrige Einstiegshöhe und 250 kg Arbeitslast

Die Allura-II-Pflegebettenserie ist mit den Liegeflächenabmessungen 100 x 200 oder 120 x 200 cm lieferbar. Die sichere Arbeitslast beträgt 250 kg, somit ist das Pflegebett auch für schwergewichtigere Personen bestens geeignet. Die Liegehöhenverstellung ist von 30 - 80 cm einstellbar. Der außergewöhnlich große Verstellbereich von 50 cm sichert ein Höchstmaß an Pflegekomfort.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Seitensicherungsschutzhöhe 38 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

## Details



Fußtieflagerung




Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

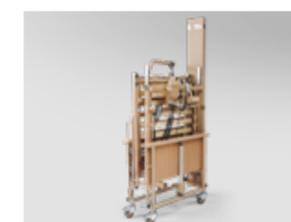

Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)

# Pflegebett Allura II

## Ausführung

- Liegefläche: 100 x 200 cm (Allura II 100) oder 120 x 200 cm (Allura II 120), 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52: 2010



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2018, Version 6, Artikel-Nr. 600836.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Leselampen



Schaumlederbezug



Servierblech für Allura II 100



Bettverlängerung  
(auch nachträglich montierbar)



Holzfüllung zur Verkleidung des  
Fahrgestells (auch nachträglich  
montierbar)

## Bestellnummern und Außenmaße


- 51.5524.33 Pflegebett **Allura II 100** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 111 cm
- 51.5724.33 Pflegebett **Allura II 120** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 131 cm
- 19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Westfalia IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

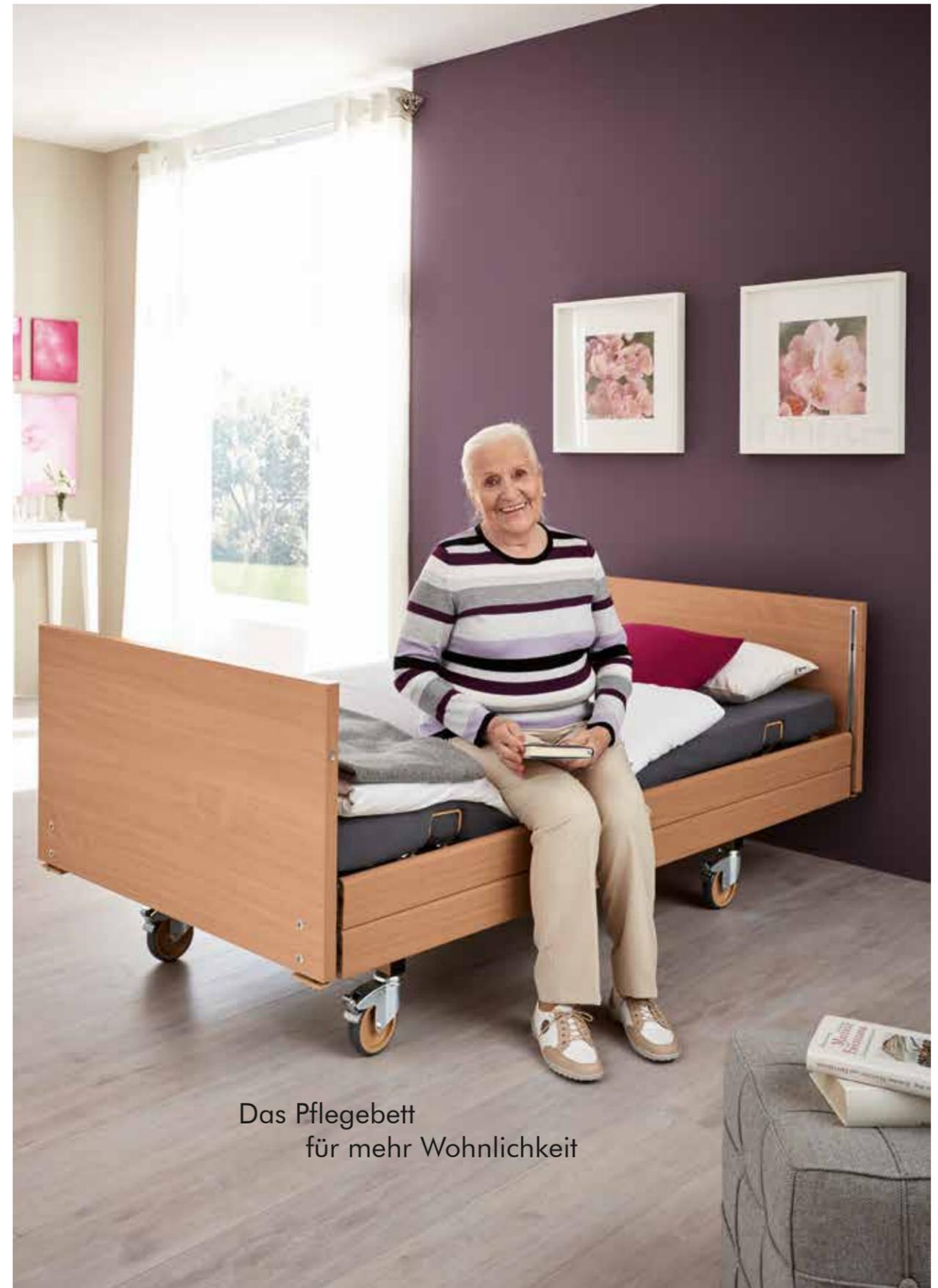

Das Pflegebett  
für mehr Wohnlichkeit

# Westfalia IV - Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Westfalia IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Bewohner finden optimale Pflegebedingungen vor. Die pflegenden Personen werden im täglichen Einsatz wesentlich entlastet.

### Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

### 24-Volt-Antriebssystem

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Unterschenkellehne  
manuell einstellbar

Hochwertige und robuste  
TENTE-Qualitätsrollen

Wartungsarmes und langlebiges  
LINAK-Antriebssystem

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Unterschiedliche  
Holzumbauten lieferbar

## Details



Handschalter  
mit selektiver  
Sperrfunktion



Rollen einzeln  
bremsbar



Höhenverstellbereich  
35 - 80 cm



Aufrichter



Häupter zur Auswahl:  
Standard (serienmäßig),  
Comodo mit Rundstollen  
(optional), Primero mit  
Griffleiste (optional)

# Pflegebett Westfalia IV

## Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne, Liegehöhenverstellung durch Elektromotor von 35 - 80 cm einstellbar, Holzumbau mit integrierten Seitensicherungen
- Liegefläche mit Federholzleisten, mittig teilbar – Metall-Liegefläche optional (nur 90 x 200 cm)
- Fahrgestell mit Einzelradfeststellung
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 185 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 04/2017, Version 1, Artikel-Nr. 600697.



Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2016

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Serviertablett



Aufstehhilfe



Adaptierbare Seitensicherung



Wandabweisrolle inkl. Halterung



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße (für Liegeflächen mit Federholzleisten)

Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß	Bestellnummer	Liegeflächenmaß	Außenmaß
51.2431.11 S	80 x 200 cm	90 x 212 cm	51.2431.11 S	90 x 220 cm	100 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 200 cm	100 x 212 cm	51.2431.11 S	100 x 200 cm	110 x 212 cm
51.2431.11 S	90 x 190 cm	100 x 202 cm	51.2431.11 S	100 x 220 cm	110 x 232 cm
51.2431.11 S	90 x 180 cm	100 x 192 cm			
19.1400.1	Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)				

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
 Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
 E-Mail: info@burmeier.com  
 www.burmeier.com




# Dali-Low Entry 24 Volt

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Einstiegshöhe von 22 cm

# Dali-Low Entry 24 Volt - Das Pflegebett mit einer niedrigen Einstieghöhe von 22 cm

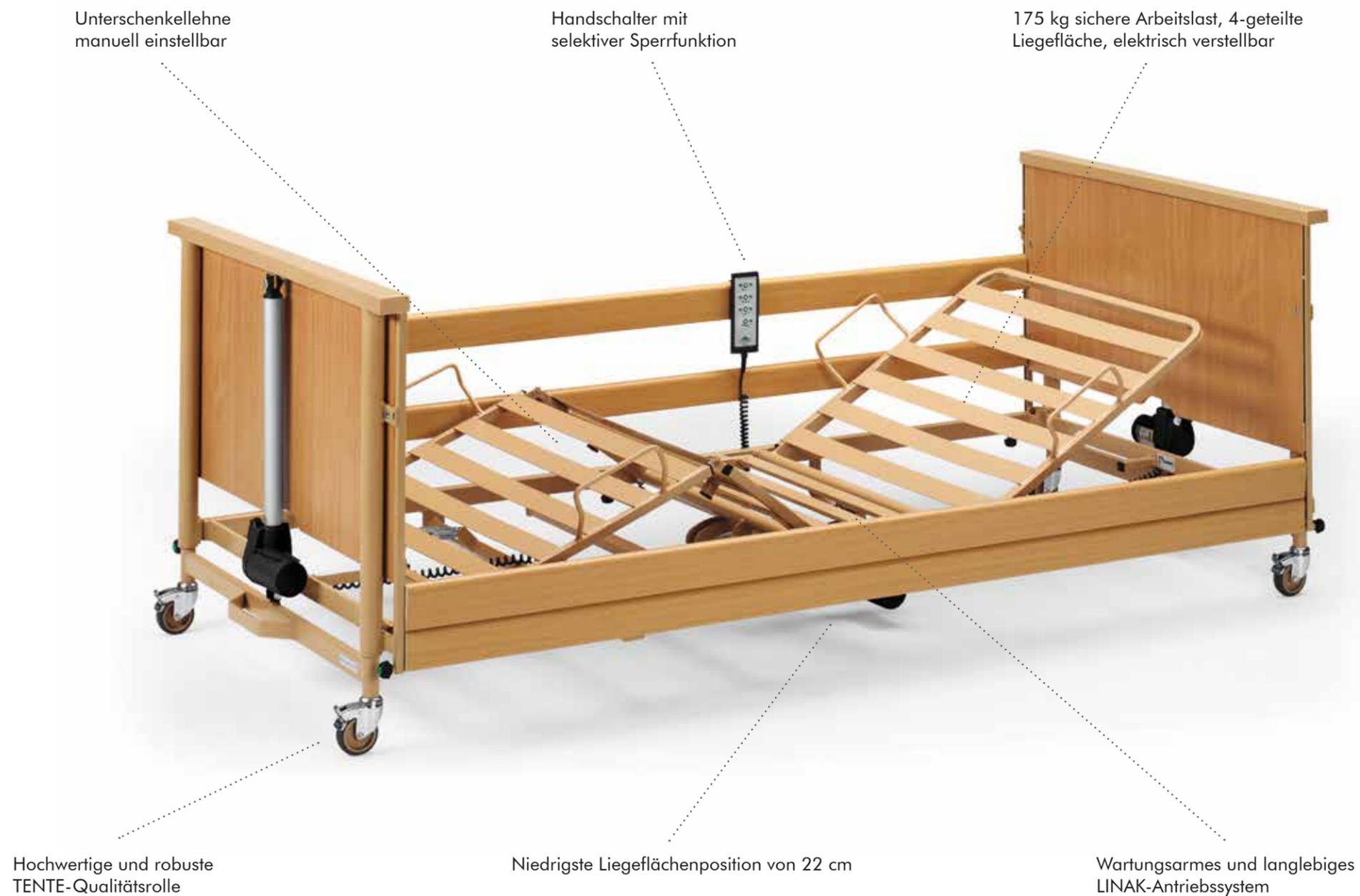

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Dali-Low Entry 24 Volt“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### Wirtschaftlichkeit/Einfache Montage durch eine Person

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie. Das Pflegebett ist durch eine Person ohne Werkzeug montierbar und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten.

### Niedrigste Einstieghöhe von 22 cm

Rollstuhlfahrer und kleinere Menschen finden optimale Bedingungen vor, um in das Bett zu steigen bzw. aufzustehen. Das Pflegebett erfüllt alle Anforderungen an ein Niedrig-Einstiegsbett.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

## Details



Fußtieflagerung



Elektronisches  
Schaltnetzteil  
(Switch Mode),  
direkt hinter Netz-  
stecker integriert



Aufnahmebuchse  
des Steckers zur  
Anbindung des  
elektronischen  
Schaltnetzteils  
(Switch Mode)



Platzsparende  
Auslieferung und  
Lagerung auf  
Lager-/Transport-  
hilfe

# Pflegebett **Dali-Low Entry 24 Volt**

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, mit Stahllamellen, 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 22 - 62 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Dekor Buche
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Niedrigste Einstiegshöhe von 22 cm
- Sichere Arbeitslast: 175 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2015. Version 4. Artikel-Nr. 600154.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Holzverkleidung für das Fahrgestell (auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Serviertablett



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

51.0622.24 S Pflegebett **Dali-Low Entry 24 Volt** (Holzseitensicherung), Länge 224 cm, Breite 101 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Lippe IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Der höhenverstellbare  
Betteinsatz

Auch erhältlich  
als Variante für die  
**automatische  
Aufbereitung**

## Betteinsatz Lippe IV - Zum Einbau in ein vorhandenes Bett

200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit  
selektiver Sperrfunktion

Matratzenbügelgriff auf 100 cm  
verbreiterbar, demontierbar



Matratzenbügelgriff  
im Fußbereich

Rastomat

Hülsen zur Aufnahme des  
Aufrichters rechts und links

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung  
des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Wartungsarmes und langlebiges  
LINAK-Antriebssystem

Standfuß mit Bodenausgleichs-  
schraube, Befestigungslasche

### Ihre Vorteile

#### Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

#### Flexibel einsetzbar

Der „Lippe IV“ lässt sich einfach in einen vorhandenen Bettrahmen einsetzen. Mit seiner großen Auswahl von Liegeflächenmaßen und seinem besonders raumsparenden Untergestell von nur 69 x 113 cm passt er fast überall hinein.

#### Sichere Arbeitslast von 200 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

#### Maschinenwaschbare Variante

Der „Lippe IV“ ist auch in einer maschinenwaschbaren Variante erhältlich. Eine kathodische Tauchlackierung (KTL) schützt ihn vor Korrosion. Das Sanitätshaus als Betreiber gewinnt Ressourcen durch den Entfall der manuellen Reinigung. Bewohner und Pflegenden können sich auf eine sichere Hygiene verlassen.

#### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Betteinsatzes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Details



Matratzenbügelgriff  
auf 100 cm  
verbreiterbar,  
demontierbar



Elektronisches  
Schaltnetzteil (Switch  
Mode), direkt hinter  
Netzstecker integriert  
(24 Volt-Antriebssys-  
tem serienmäßig)



Handschalter



Standfuß mit  
Bodenausgleichs-  
schraube,  
Befestigungslasche



Aufnahmebuchse  
des Steckers zur  
Anbindung  
des elektronischen  
Schaltnetzteils  
SwitchMode

# Betteinsatz Lippe IV

## Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24-Volt-Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar
- Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung von 29 cm bis 74 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: 29 cm
- sichere Arbeitslast: 200 kg
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2018, Version 5, Artikel-Nr. 600869.



Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

## Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen



Leselampen



Aufrichter



Lippe-Seitensicherung (auch nachträglich montierbar)



Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+7 cm)



Verbreiterungsschiene 5 cm



Adaptierbare Seitensicherung

## Bestellnummern und Außenmaße


Bestellnummer	Liegeflächen-Nennmaß	tatsächliches Liegeflächenmaß	Bestellnummer	Liegeflächen-Sondermaß	tatsächliches Liegeflächenmaß
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm	30.9456.6	80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm	30.9456.5	80 x 200 cm	75 x 195 cm
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm			
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm			

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
 Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
 E-Mail: info@burmeier.com  
 www.burmeier.com



# Lippe 120/140

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

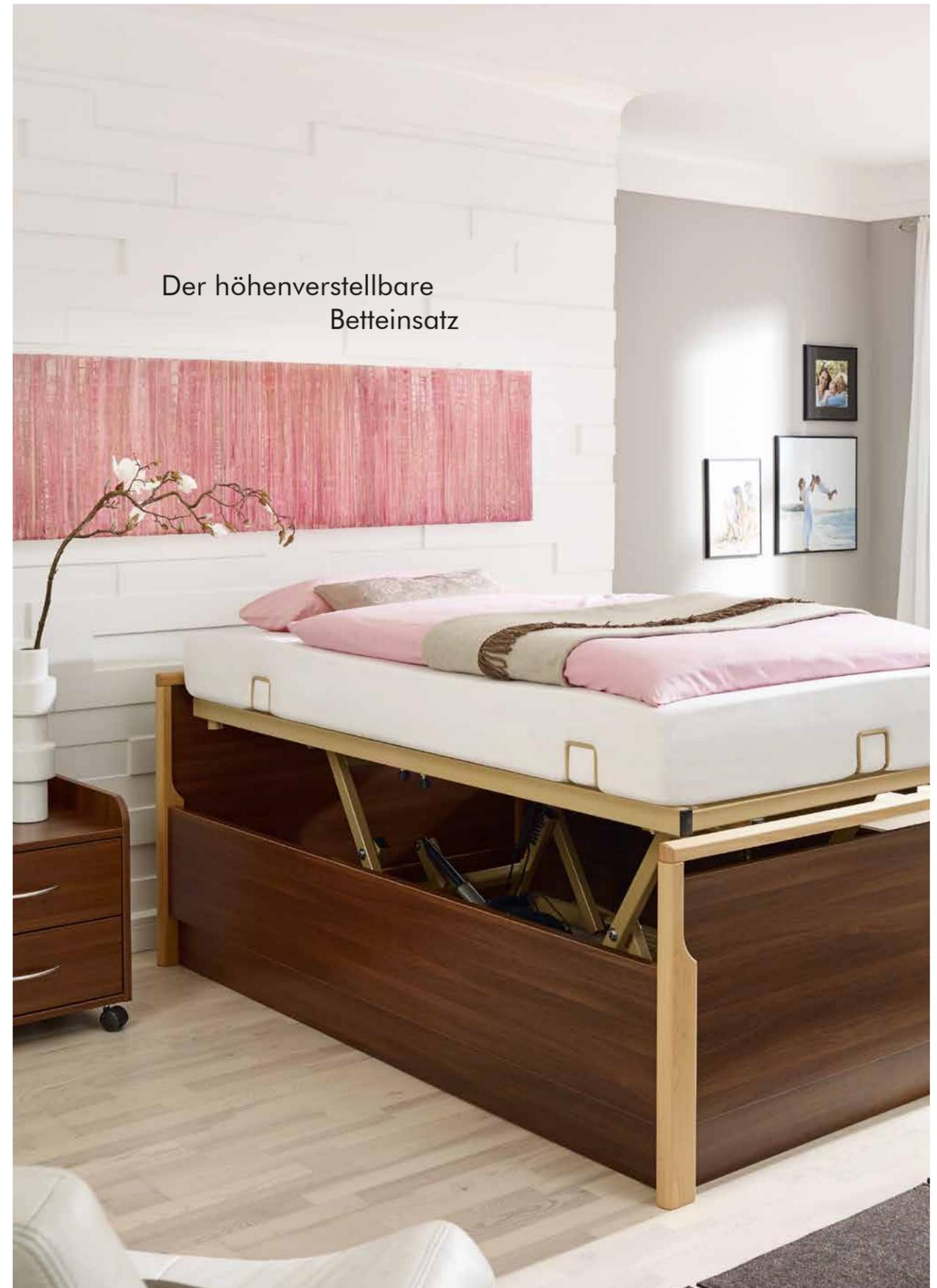

250 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

komfortable Liegeflächenbreite von 120 und 140 cm

Doppelhubschere



Standfuß mit Bodenausgleichsschraube, Befestigungslasche

Liegefläche in der Mitte geteilt

Ausstattung mit busbasiertem Antriebssystem für Assistenzsysteme

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

## Betteinsatz Lippe 120/140 -

### Die praktische Alternative zum Schwerlastbett

#### Ihre Vorteile

##### Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe 120/140“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

##### Sichere Arbeitslast von 250 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

##### Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

##### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Betteinsatzes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

#### Details



Standfuß mit Bodenausgleichsschraube, Befestigungslasche



Kugelgelagerte Höhenverstellung



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem serienmäßig)



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Niedrige Einstiegs-  
höhe von 29 cm –  
erleichtert den  
Ein- und Ausstieg

# Betteinsatz **Lippe 120/140**

## Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Liegehöhenverstellung von 29 cm bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Doppelhubschere für stabilen Stand in jeder Position
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 11/2015, Version 4, Artikel-Nr. 600165.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Leselampen



Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm)



Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar)



Aufrichter

## Bestellnummern und Außenmaße

30.9956.12 Betteinsatz **Lippe 120**, Liegeflächen-Nennmaß 120 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 115 x 195 cm

30.9956.14 Betteinsatz **Lippe 140**, Liegeflächen-Nennmaß 140 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 135 x 195 cm

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Gigant

Clinic | Care | **Homecare** | Assist




# Gigant - Das Pflegebett für schwergewichtige Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht

350 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Ergonomisch  
geformter Griff

Äußerst robuste Liegefläche  
mit Stahleinlagen, Liegeflächen-  
breite: 120 cm

Optionale kombinierbare Seiten-  
sicherung, mit durchgehender  
Seitensicherung kombinierbar

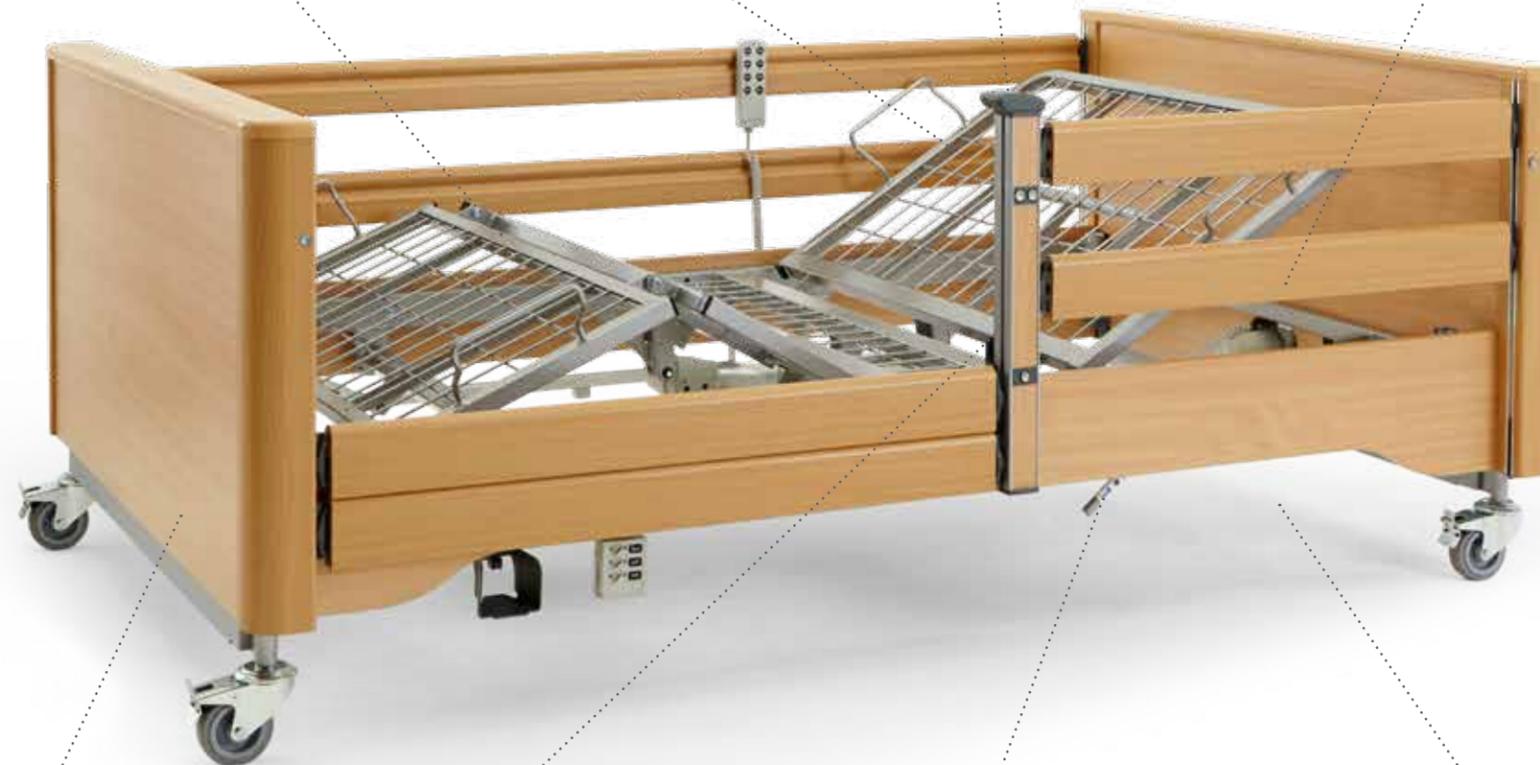

Mobilisierungsstütze bietet festen Griff  
und erleichtert den Ein- und Ausstieg

Unterfahrbarkeit mit allen  
handelsüblichen Liftern

Holzhauben im modernen Design,  
Kunststoffverkleidung und Seitenblenden  
sorgen für ein wohnliches Ambiente

Notabsenkung der Rücken-  
lehne aus jeder Position

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Gigant“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### Sichere Arbeitslast von 350 kg

Die Liegefläche beim Pflegebett Gigant kann mit einem Gewicht bis zu 350 kg belastet werden. Bewohner bis zu 280 kg Körpergewicht finden auf der 120 cm breiten Liegefläche optimale Bedingungen vor. Bei Bedarf kann die Liegefläche auf 220 cm verlängert werden (Betverlängerung als Zubehör).

### Mobilität und Komfort

Die schnelle Mobilisierung der Pflegebedürftigen gewinnt im heutigen Pflegealltag immer mehr an Bedeutung. Deshalb unterstützt das Gigant mit gezielten Funktionen diesen Prozess. Die Mobilisierungsstütze der kombinierbaren Seitensicherungen (optional) bietet dem Pflegebedürftigen mit dem ergonomisch geformten Handknopf einen festen Griff und mehr Sicherheit. Mit der kombinierbaren Seitensicherung werden die Anforderungen gegen freiheitsentziehende Maßnahmen eingehalten. Die Kombination mit den durchgehenden Seitensicherungen ist möglich.

## Details



Aufnahme für die  
Mittelstütze (links)  
und die Sperrbox  
(rechts)



Notabsenkung der  
Rückenlehne



Äußerst stabile  
Konstruktion der  
Seitensicherung



Kunststoffverkleidung  
der Fahrgestelle für  
mehr Wohnlichkeit

# Schwerlast-Pflegebett **Gigant**

## Ausführung

- Liegefläche 120 x 200 cm, einteilig und nicht zerlegbar, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar (Einstellung über Handschalter)
- Notabsenkung der Rückenlehne
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe argentum
- Holzbau in Buche Dekor/Buche massiv
- Sichere Arbeitslast: 350 kg
- max. Patientengewicht: 280 kg

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52:2010



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2018, Version 5, Artikel-Nr. 600840.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Kombinierbare Seitensicherung



Leselampen



Bettverlängerung inkl. längerer Seitensicherungen und Seitenbretter



Aufsteckbarer Seitensicherungsholm



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

59.6631.1 Schwerlast-Pflegebett **Gigant**, Länge 222 cm, Breite 135 cm

19.1400.1 Aufrichter mit Triangelgriff (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)




# Inovia

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



## Das Pflegebett mit innovativen Ideen

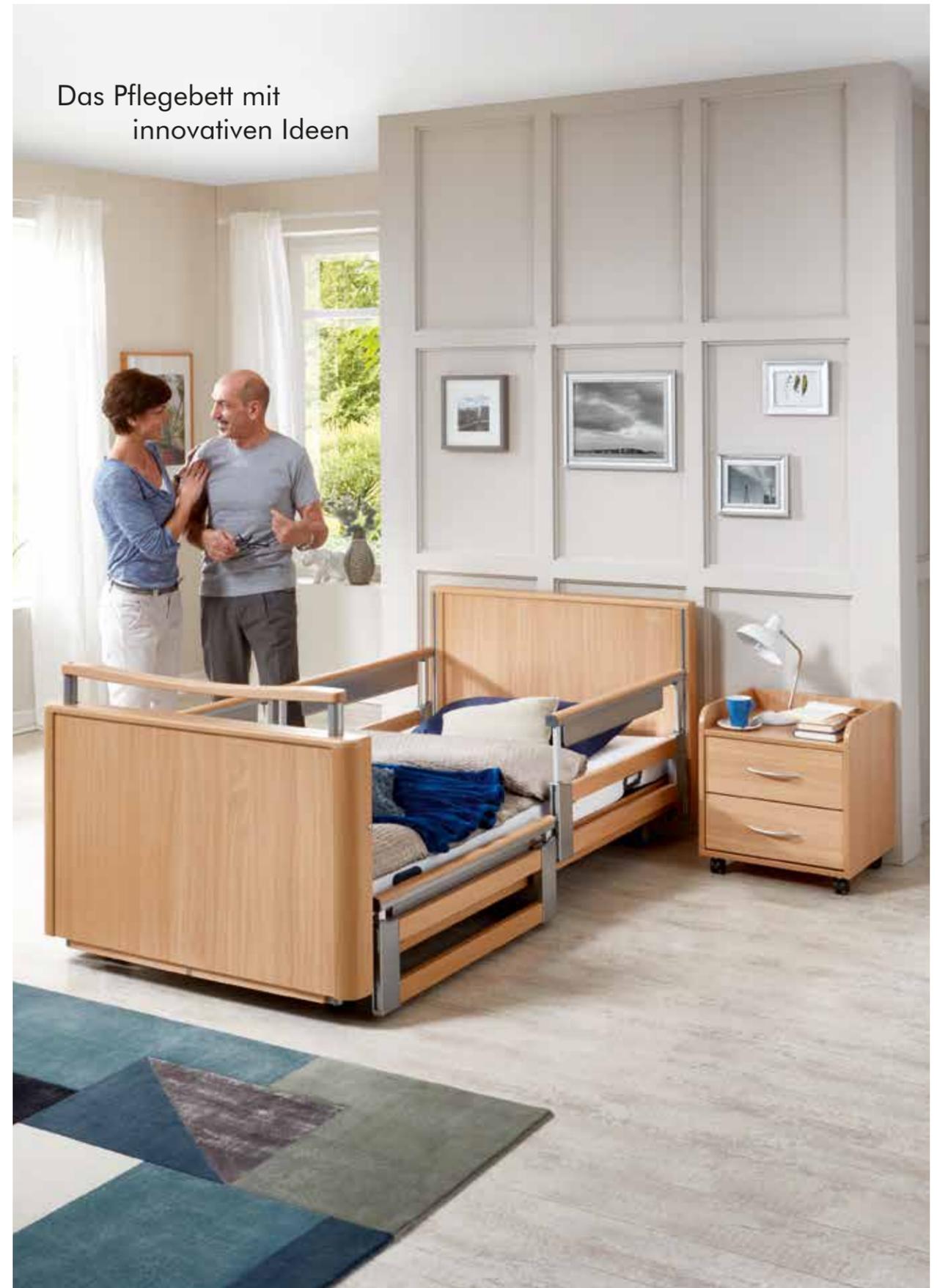



Seitensicherungsschutzhöhe von 41 cm für Matratzen bis max. 19 cm

Auswandernde Rückenlehne

# Inovia - Das Pflegebett mit innovativen Ideen

## Ihre Vorteile

### Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm

Der innovative Verstellbereich von 55 cm ermöglicht die Nutzung des Pflegebettes als Niedrigbett zur Sturzprophylaxe.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Sichere Arbeitslast von 225 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

### Teleskopierbare Seitensicherung optional

Die optionale teleskopierbare Seitensicherung (TSG) lässt sich in 2 Stufen bequem nach oben ausziehen. Wird nur die kopfseitige Seite hochgezogen, bleibt dem Bewohner ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg.

### Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBFK-Empfehlung

Die auswandernde Rückenlehne schützt den Bewohner während der Verstellung des Bettes vor unangenehmen Scherkräften und trägt dadurch zur Dekubitusprophylaxe bei. Durch das Zurückweichen der angestellten Rückenlehne vergrößert sich der Sitzbereich und der Komfort des Bewohners steigt erheblich.

Praktische, wohnliche Griffleiste aus Massivholz

Holzhaube im ansprechenden Wohndesign

Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition

Einfach zu reinigende Liegeflächen-Lamellen

## Details



Griffleiste aus Massivholz



Paarweise Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition



Handschalter mit selektiver Sperrung



Auswandernde Rückenlehne



Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm, Verstellbereich = 55 cm

# Pflegebett Inovia

## Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Stahl-Lamellen  
Liegehöhenverstellung von 22 - 77 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv
- Fußteil mit Griffleiste aus Massivholz (optional auch kopfseitig)
- Integrierte Seitensicherungen, Schutzhöhe 41 cm, für Matratzen bis 19 cm Höhe
- Innovative/wohnliche Optik
- 24-Volt-Antriebssystem



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2018, Version 6, Artikel-Nr. 600842.

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

## Zubehör

(gegen Mehrpreis  
lieferbar)



Teleskopierbare  
Seitensicherung (TSG)



Schaumlederbezug für DSG



Schaumlederbezug für TSG



Kojenbrett



Bettenverlängerung



Serviertablett



Leselampe Sola

- Wandabstandsrollen
- Holzumbau in Kirsche Edel, Havanna Kirsche oder Königsahorn

## Bestellnummern und Außenmaße


- 50.5522.24 Pflegebett **Inovia**, Länge 220 cm, Breite 105 cm
- 55.5522.34 Pflegebett **Inovia 100**, Länge 220 cm, Breite 115 cm
- 19.1400.1 Aufrichter

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Regia

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

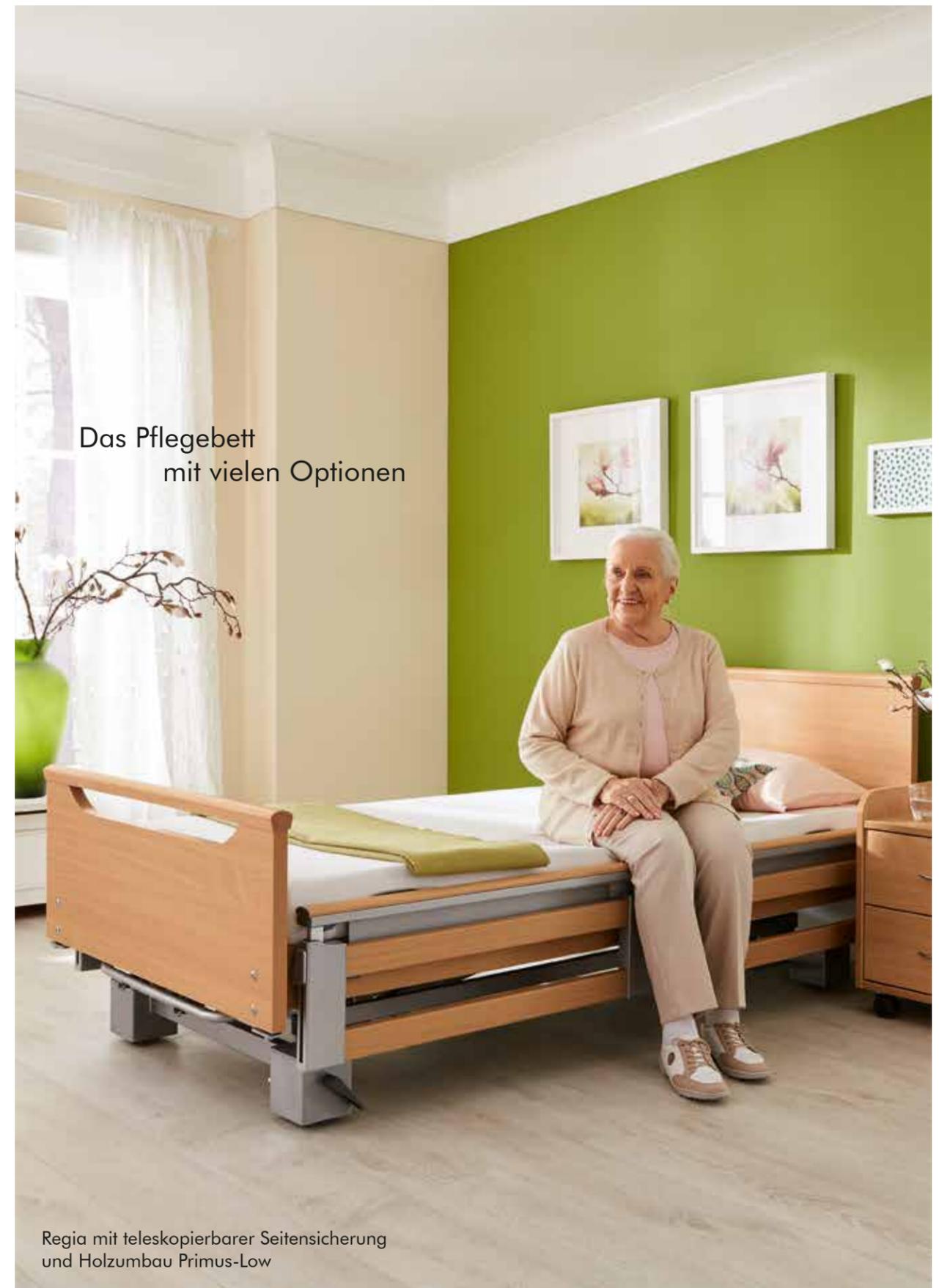

Das Pflegebett  
mit vielen Optionen

Regia mit teleskopierbarer Seitensicherung  
und Holzumbau Primus-Low



Holzumbau Primus

Seitensicherung vertikal in 2 Stufen teleskopierbar

auswandernde Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung

elegant verkleidete Rollen

optionale zentrale Rollenfeststellung

Unterschenkellehne elektrisch stufenlos verstellbar (Autokonturfunktion)

serienmäßig geteilte Seitensicherungen auf beiden Seiten

## Regia - Das Pflegebett mit vielen Optionen

### Ihre Vorteile

#### Teleskopierbare Seitensicherung serienmäßig

Die serienmäßige teleskopierbare Seitensicherung (TSG) lässt sich in 2 Stufen bequem nach oben ausziehen. Wird nur die kopfseitige Seite hochgezogen, bleibt dem Bewohner ausreichend Raum zum Ein- und Ausstieg. So folgt Burmeister der Philosophie des Werdenfeler Weges, auf freiheitsentziehende Maßnahmen konsequent zu verzichten.

#### Großer Höhenverstellbereich

Mit seinem sehr weiten Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm wird das Regia allen Anforderungen in der Pflege gerecht. Die tiefste Position ist sehr niedrig und leistet einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Sturzverletzungen. Dank seiner 3-Stopp-Funktion hält das Bett automatisch bei einer mittleren Position von ca. 40 cm – der idealen Höhe für einen bequemen Ein- und Ausstieg. In der oberen Position bietet das Regia dem Pflegenden die Möglichkeit, ergonomisch günstig auf Hüfthöhe zu arbeiten.

#### Sichere Arbeitslast 225 kg

Das Regia bietet auch schwergewichtigen Bewohnern viel Komfort.

#### Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung

Die auswandernde Rückenlehne schützt den Bewohner während der Verstellung des Bettes vor unangenehmen Scherkräften und trägt dadurch zur Dekubitusprophylaxe bei. Durch das Zurückweichen der angestellten Rückenlehne vergrößert sich der Sitzbereich und der Komfort des Bewohners steigt erheblich.

### Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Kojenbrett



Komfort-Liegefläche



Schaumlederbezug



Unterbettlicht



Wandabweisrolle

# Pflegebett Regia

## Ausführung

- Liegefläche: 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden und robusten Metall-Lamellen, Liegehöhenverstellung von 26 - 80 cm, alle Liegeflächenelemente durch Elektromotoren verstellbar, Fußtieflage bis 15° mit automatischer Einstellung der Autokontur zur Stabilisierung der Position des Bewohners
- Liegefläche mit auswandernder Rückenlehne nach DBfK-Empfehlung
- Rollen paarweise in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- sichere Arbeitslast 225 kg
- Kopf- und Fußteil Standard im Dekor Buche Natur
- dezente Rollenverkleidung in eckiger Form

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 03/2017, Version 3



Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52/ A1

## Ausstattung und Optionen

Ausführung	Regia
Liegefläche 90 x 200 cm	●
Liegefläche 100 x 200 cm (nur in Verbindung mit Rundstollen und Dekor Buche Natur)	○
Metall-Liegefläche	●
Komfort-Liegefläche	○
2x2-Rollenfeststellung	●
4-Rollen-Zentralfeststellung	○
DewertOkin 24 Volt	●
Kopf- und Fußteil Standard	●
Kopf- und Fußteil Comodo mit Rundstollen	○
Kopf- und Fußteil Prinzino	○
Kopf- und Fußteil Primus (kopfseitig geschlossen/fußseitig mit Griffleiste) <sup>1)</sup>	○
Dekor Buche Natur	●
Dekore Königsahorn, Kirsche Edel, Kirsche Havanna	○
Aufrichter	○
teleskopierbare Seitensicherungen (TSG) beidseitig	●
Kojenbrett (200 oder 227 cm)	○
Unterbettbeleuchtung	○
Notabsenkung Batterie	●
mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	○
Schaumlederbezug	○
Leseleuchte	○
Trendelenburg-Handschalter (nur für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen)	○
Bettverlängerung 27 cm, Polsterteile zur Matratzenverlängerung lieferbar	○
Bettzeugablage	○
Wandabweisrollen (2 Stück/4 Stück wahlweise)	○
Infusionshülse fußseitig	○
Außenmaße 90 x 200 cm	100 x 210 cm
Außenmaße 100 x 200 cm	110 x 211 cm
Bestellnummer	<b>50.2025.12</b>

<sup>1)</sup> fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low

● = Standard ○ = optional



Standard



Comodo mit Rundstollen



Prinzino




Primus kopfseitig geschlossen/  
fußseitig mit Griffleiste

# Westfalia-Klassik




Clinic | Care | **Homecare** | Assist

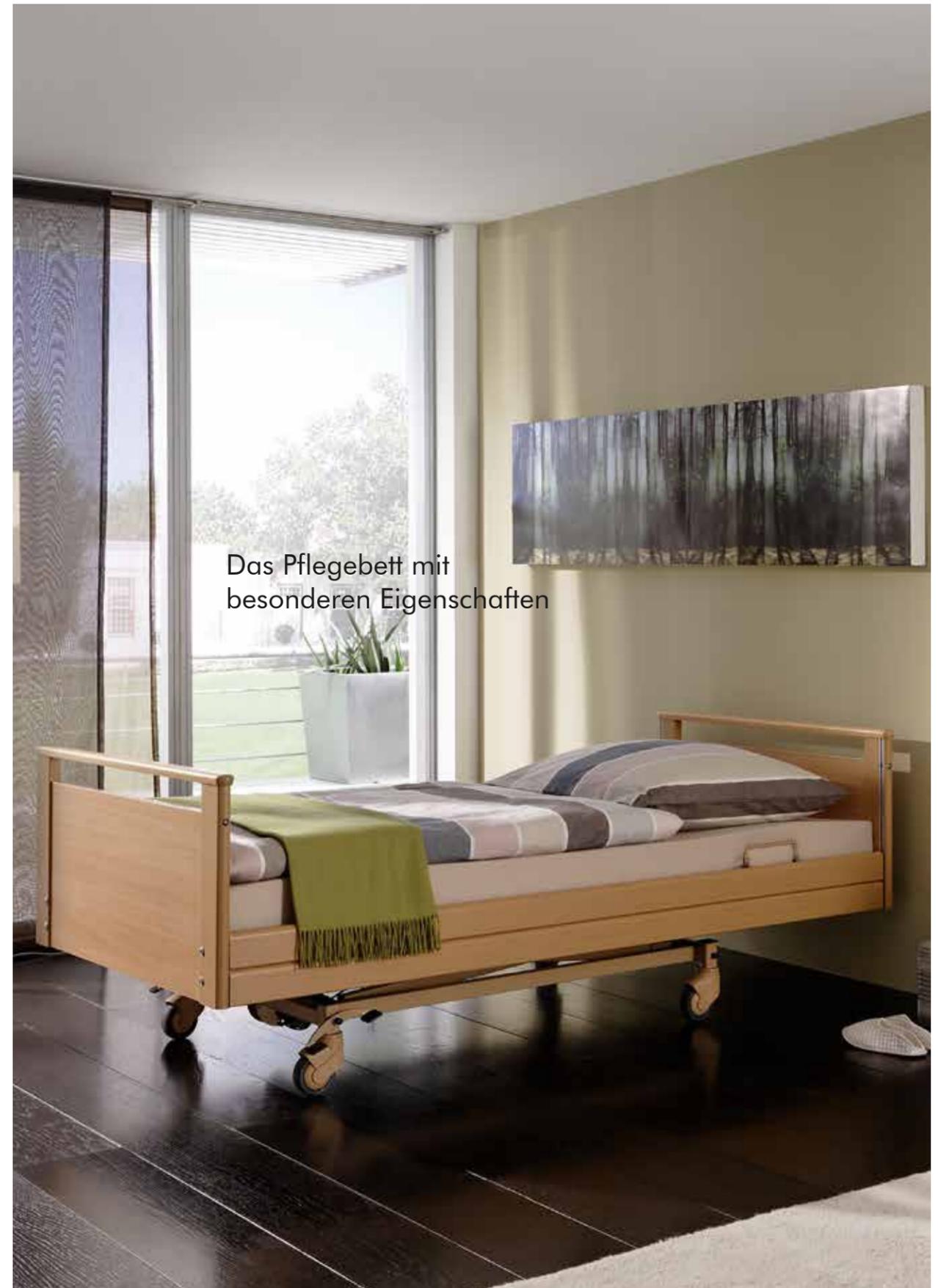

Das Pflegebett mit besonderen Eigenschaften

# Westfalia-Klassik - Das besondere Pflegebett

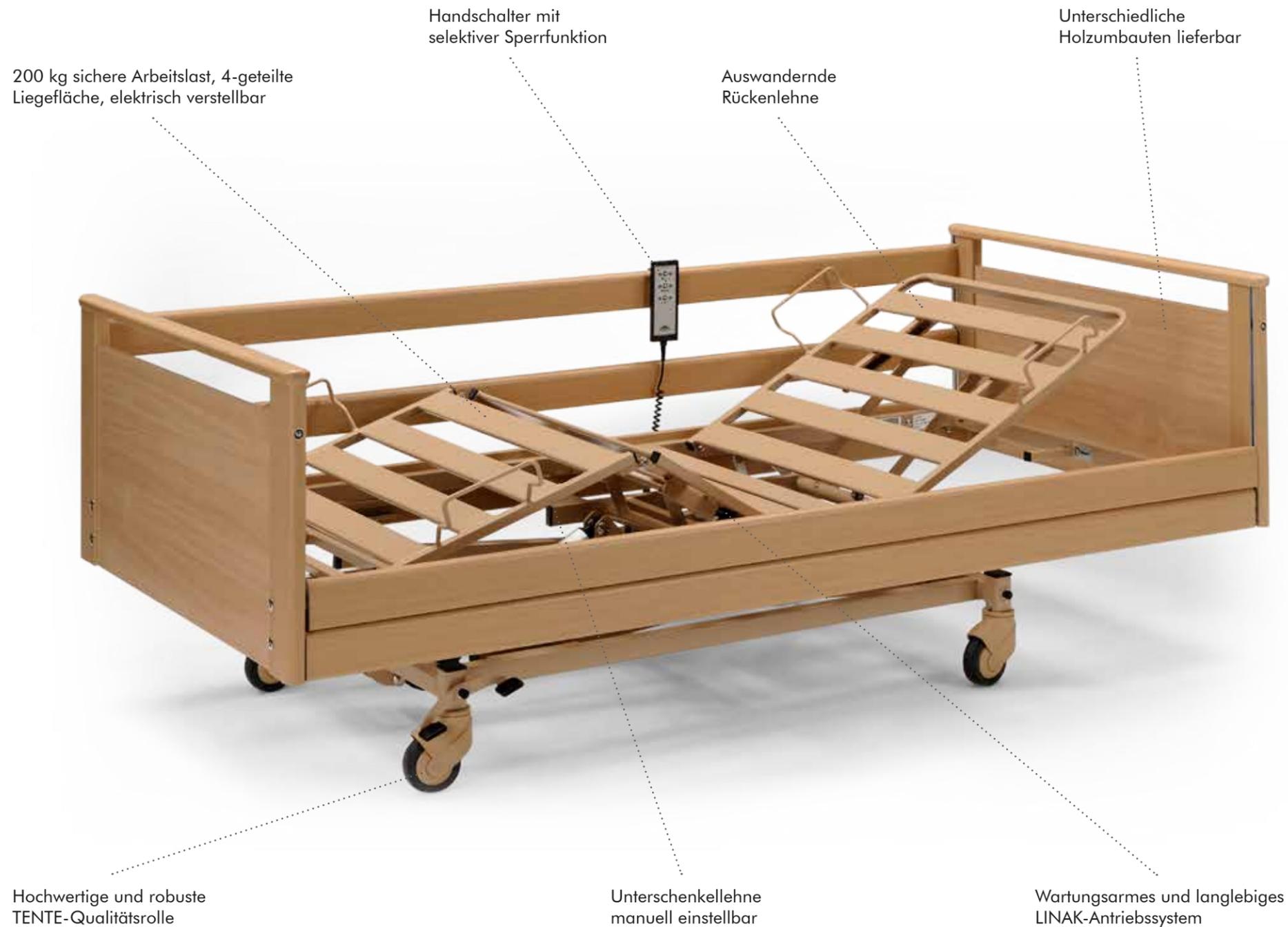

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Westfalia-Klassik“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Die Bewohner finden optimale Pflegebedingungen vor. Die pflegenden Personen werden im täglichen Einsatz wesentlich entlastet.

### Wirtschaftlichkeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

## Details



Zentrale Rollenfeststellung in jeder Liegeflächenposition möglich



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Liegehöhenverstellung von 35-80 cm, Verstellbereich = 45 cm



Holzumbauten: Standard (serienmäßig), Comodo mit Rundstollen (optional), Primero mit Griffleiste (optional)



Elegante Variante mit Lito-Häuptern im Magnolia-Dekor, Gestellfarbe Argentum, verkleideten Rollen und Zentrallrollenfeststellung

# Pflegebett **Westfalia-Klassik**

## Ausführung

- Liegefläche 90 x 200 cm, 4-geteilt, mit leicht zu reinigenden, robusten Stahl-Lamellen, auswandernder Rückenlehne und einer Liegehöhenverstellung von 35 - 80 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Rollen zentral in jeder Liegeflächenposition feststellbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Holzbau in Buche mit integrierten Seitensicherungen in wohnlicher Optik, Dekor/Buche massiv
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2015, Version 4, Artikel-Nr. 600199.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Serviertablett



Wandabweisrolle



Holzumbauten:  
Standard (serienmäßig),  
Comodo mit Rundstollen (optional),  
Primerio mit Griffleiste (optional)



Leselampen



Bettenverlängerung mit Metallstreben, Seitensicherungen und Seitenbrettern



Schaumlederbezug

## Bestellnummern und Außenmaße

50.5431.1 Pflegebett **Westfalia-Klassik**, Länge 211 cm, Breite 102 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Relax

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das kombinierbare  
Seniorenbett



Doppelbett „Relax“ mit  
höhenverstellbarem  
Betteinsatz „Lippe IV“

## Seniorenbett Relax - Das kombinierbare Wunsch-Seniorenbett

### Ihre Vorteile

#### Funktionsfähigkeit

Es besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Komponenten ein voll funktionsfähiges Seniorenbett zusammenzustellen. Das Seniorenbett „Relax“ ist in den Größen 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 120 x 220 cm, 140 x 200 cm sowie 140 x 220 cm erhältlich. Darüber hinaus stehen 4 verschiedene Dekore, ein elektrisch verstellbarer Lattenrost und der höhenverstellbare Betteinsatz „Lippe IV“ zur Auswahl. Für die 120/140 cm breiten Modelle steht der Betteinsatz „Lippe 120/140“ zur Verfügung. Hier können optional bodentiefe Bettseiten geliefert werden, durch sie wird das Untergestell des Einlegerahmens vollständig verdeckt.

#### Komfortabel und seniorenrecht

Die Einstiegshöhe von 45 cm erleichtert den Ein- und Ausstieg.

#### Zubehör

Für das Seniorenbett „Relax“ steht ein umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Auswahl.

### Details



Einzelbett „Relax“ mit Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar



Einzelbett „Relax“ mit höhenverstellbarem Betteinsatz „Lippe“ und bodentiefen Bettseiten, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar



2 Einzelbetten als Doppelbett zusammengestellt, Mittelspalt durch Holzabdeckung verkleidet



Auflageleisten für Lattenrost in 4 Stufen (à 2 cm) höhenverstellbar. Niedrigster Punkt 26 cm



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Buche Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Ahorn Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Havanna Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Bella Noce Dekor

# Seniorenbett Relax

## Ausführung

- Stollenfüße der Kopf- und Fußteile sowie Griffleiste im Fußteil in Buche massiv ausgeführt
- Füllungen und Bettseiten in Dekor-Optik (4 verschiedene Dekore nach Wahl)
- Einstiegshöhe: 45 cm (gemessen von der Oberkante Bettseite zum Fußboden)
- Einstiegshöhe lässt sich durch die höhenverstellbaren Auflageleisten für den Lattenrost individuell einstellen



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 5. Artikel-Nr. 600846.

## Zubehör


(gegen Mehrpreis lieferbar)



Aufstehhilfe in Kombination mit Lippe IV (Lippe 120 Abb. ähnlich)



Seitensicherung aufsteckbar in Kombination mit Lippe IV

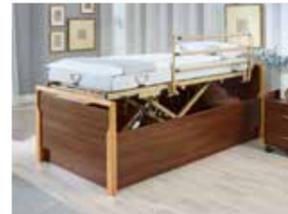

adaptierbare Seitensicherung in Kombination mit Lippe IV



Aufrichter mit Triangelgriff in Kombination mit Lippe IV



Holz-Abdeckung (Buche Dekor) zur Verkleidung des Mittelspaltes bei Nutzung als Doppelbett



Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar (90 x 200 cm und 100 x 200 cm)



Höhenverstellbarer Betteinsatz Lippe IV, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektrisch verstellbar

## Bestellnummern und Außenmaße

	90 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	100 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 220 cm (Liegeflächenmaß)	140 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	140 x 220 cm (Liegeflächenmaß)
	100 x 209 cm (Außenmaß)	110 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 229 cm (Außenmaß)	150 x 209 cm (Außenmaß)	150 x 229 cm (Außenmaß)
	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
Dekor Buche	53.5311.92	53.5311.12	53.5311.22	53.5311.23	53.5311.42	53.5311.43
Dekor Königsahorn	53.5184.92	53.5184.12	53.5184.22	53.5184.23	53.5184.42	53.5184.43
Dekor Kirsche Havanna	53.5681.92	53.5681.12	53.5681.22	53.5681.23	53.5681.42	53.5681.43
Dekor Bella Noce Schoko	53.4889.92	53.4889.12	53.4889.22	53.4889.23	53.4889.42	53.4889.43

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
 Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
 E-Mail: info@burmeier.com  
 www.burmeier.com



## Weitere Produkte



**Zubehör** – Originalzubehör für Pflegebetten und Einlegerahmen



**Geteilte Seitensicherungen** – Lösungsansätze zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen



**Ravello** – Der Pflegestuhl für mehr Mobilität



**Nachtische** – Überzeugend funktional



**Kastenmöbel** – Flexibilität und Funktionalität



**Stühle** – Das Residenz-Programm

## Weitere Produkte




## Zubehör

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Originalzubehör für  
Pflegebetten und  
Einlegerahmen

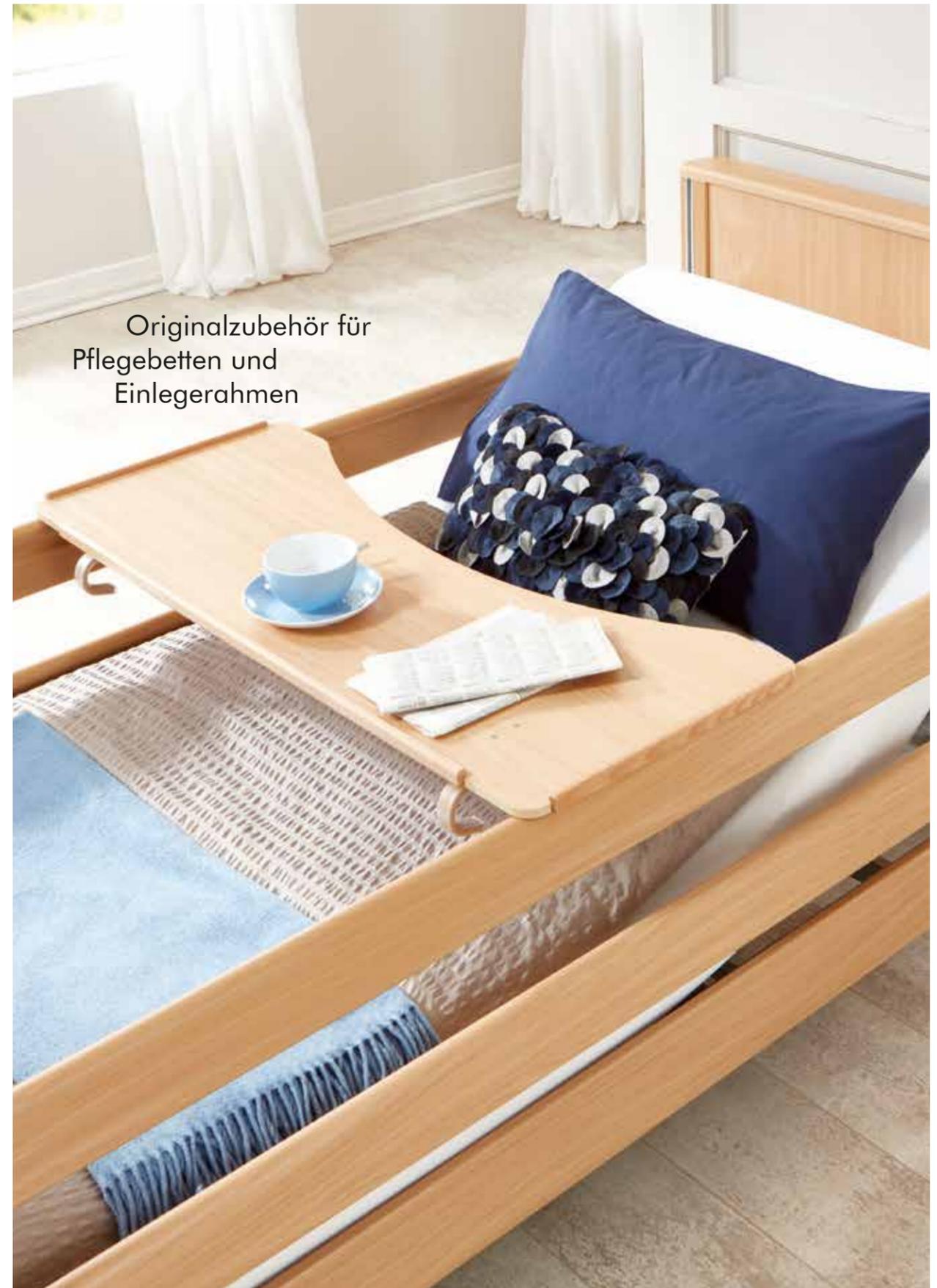

# Zubehör für Pflegebetten und Einlegerahmen



Füllpolster (links) und Schaumlederbezug (rechts) für alle Modelle mit durchgehenden Seitensicherungen



Kojenbrett (links) und Schaumlederbezug (rechts) für Regia, Inovia und Inovia 100



Links: aufsteckbarer Seitensicherungsholm für: Arminia III, Dali II, Economic II, Gigant  
Rechts: drehbarer Handlauf für: Arminia III, Dali II, Economic II




Komfortliegefläche für Inovia, Inovia 100 und Regia



Serviertablett zum Auflegen auf die angestellten Seitensicherungen (auch bei 100 cm Liegefläche) für: Allura II 100, Arminia III, Dali II, Dali-Low Entry, Economic II, Inovia und Inovia 100, Westfalia IV, Westfalia-Klassik




Leselampe, mit einer Klaue am Aufrichter befestigt (links) oder in bestehende Aufrichtershülse integriert (rechts), erhältlich für alle Modelle

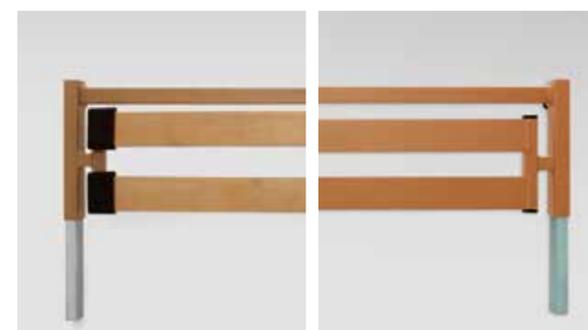

Bettverlängerung 20 cm mit Federholzleisten oder Metallstreben für die fußseitige Montage für: Arminia III, Dali II, Economic II, Westfalia IV, Westfalia-Klassik



Softcover für Economic II, Dali II und Dali-Wash sowie für die Seitensicherungen des Arminia III

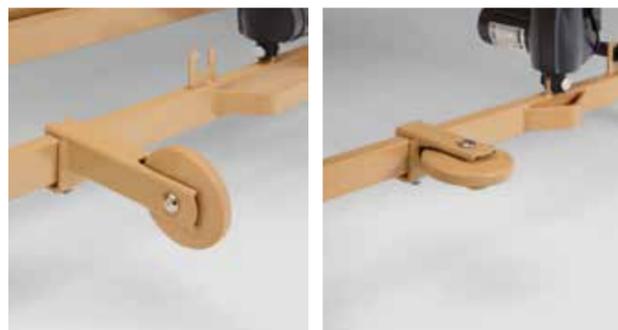

Wandabweisrolle inkl. Halterung: links für Allura-II-Serie, rechts für Arminia III, Dali II, Dali-Low Entry, Economic II




Wandabweisrolle inkl. Halterung: links für Regia, rechts für Westfalia IV, Westfalia-Klassik (Ø=60 mm oder Ø=100 mm)



Bettverlängerung 20 cm mit Metallstreben für fußseitige Montage für: Allura-II-Serie, Lippe 120/140, Inovia-Serie (TSG: 27 cm) und Regia (TSG: 27 cm)



adaptierbare Seitensicherung (ASG) für Arminia III, Dali II, Economic II, Lippe IV, Westfalia IV

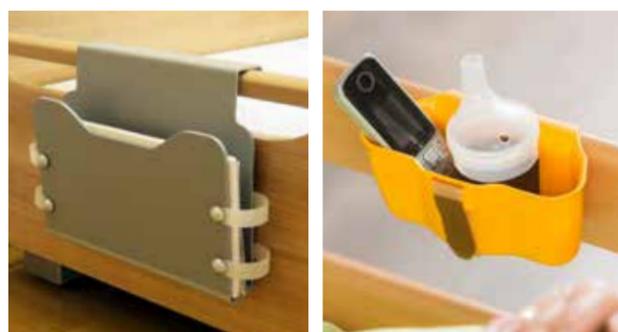

Links: Journalhalter für Allura-II-Serie, Regia, Westfalia-Serie  
Rechts: Aufnahmeschale für alle Modelle (außer Lippe-Serie)



Links: Geberhalter für Handschalter für: Arminia III, Dali-Serie, Economic II, Lippe IV, Westfalia-Serie  
Rechts: Handschalter-Verlängerkabel für: Arminia III, Dali-Serie, Lippe IV, Westfalia-Serie



Holzverkleidung für das Fahrgestell inkl. Montagematerial für: Allura-II-Serie, Dali II, Dali-Low Entry, Economic II (Bild: Modellbeispiel)



Aufstehhilfe für: Allura-II-Serie, Arminia III, Dali II, Dali-Low Entry, Economic II, Westfalia IV



Aufrichter



Verbreiterungsschiene 5 cm (nur Lippe IV)



Aufstehhilfe



Seitensicherung auch mit Verbreiterungsschiene kombinierbar (nur Lippe IV)



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen (nur für Lippe IV)



adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm)



Leselampe, mit einer Klaue am Aufrichter befestigt (links) oder in bestehende Aufrichterhülse integriert (rechts)



um ca. 19 cm erhöhte Matratzenbügelgriffe zur Fixierung von Anti-Dekubitus-Systemen

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 7. Artikel-Nr. 600848.

## Geteilte Seitensicherungen

Auf der einen Seite ist es oberstes Gebot, den Bewohner zu schützen und vor dem Fall aus dem Bett zu sichern. Auf der anderen Seite ist die Freiheit des Einzelnen ein kostbares Gut und sollte so wenig wie möglich eingeschränkt werden.

Dennoch wird in schwierigen Situationen oft die Fixierung als einzige denkbare Möglichkeit, den Pflegebedürftigen zu schützen, angesehen.

Wie kann man Fixierungen umgehen und trotzdem den Bewohner ausreichend schützen?

Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie Sie mithilfe unserer geteilten Seitensicherungen Schutz und Freiheit des pflegebedürftigen Menschen kombinieren können. Wird eine geteilte Seitensicherung nur kopfseitig angestellt, bietet sie dem Bewohner viel Sicherheit und ermöglicht dennoch einen bequemen Ein- und Ausstieg.



### MultiFlex-Seitensicherung für unser Vertica homecare

- Schutzhöhe: 41,5 cm
- umlaufender Kantenschutz an der Seitensicherung
- Mobilisationsstützen sind beidseitig klappbar und dienen gleichzeitig als Aufstehhilfe



### Teleskopierbare Seitensicherung für unser Regia und Inovia

- beidseitige geteilte Seitensicherung
- 2-stufig nach oben ausziehbar
- einfach zu bedienen



## Kombinierbare Seitensicherung für unser Gigant

- Schutzhöhe: 41 cm
- Mittelstütze mit ergonomisch geformtem Griff ist abnehmbar und dient gleichzeitig als Aufstehhilfe
- durch die abnehmbare Mittelstütze ergibt sich ein offener und großer Arbeitsbereich über die gesamte Liegefläche
- mit durchgehenden Seitensicherungen kombinierbar



## Adaptierbare Seitensicherung für unser Arminia III 24V, Dali II 24V, Economic II, Westfalia IV und Lippe IV

- Schutzhöhe: 39 cm, Länge: 120 cm
- kostengünstige Alternative
- einfache und schnelle Montage
- Befestigung erfolgt durch 2 Aufnahmewinkel am Liegeflächenrahmen
- mit durchgehenden Seitensicherungen kombinierbar



Die teleskopierbare geteilte Seitensicherung ermöglicht eine ideale Kombination aus Schutz, Freiheit und Mobilisierung. Unser Bild zeigt das Pflegebett Inovia.



Der Pflegestuhl für mehr Mobilität

Modell: Ravello-Curo „S“

Rückenlehne lässt sich in eine 43°-Liegeposition neigen

Ergonomisch geformter Sitz

Armlehnen sind auf Sitzhöhe absenkbar und erleichtern maßgeblich das Ein- und Aussteigen

Breite Armlehnen für eine gute Haltung des Unterarms

Hebel: Liegeposition ist auch durch den Bewohner einstellbar

Paarweise feststellbare Rollen hinten

Fest installierte und in der Länge verstellbare Fußstütze, schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit

Sichere Arbeitslast: 200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)

## Ravello-Sano und Ravello-Curo - Die Pflegestühle für mehr Mobilität

### Ihre Vorteile

#### Sicherheit, Komfort und Funktionalität

Das sind die herausragenden Eigenschaften unseres Ravello. Pluspunkte, von denen Bewohner wie Pflegepersonal gleichermaßen profitieren. Der gepolsterte, ergonomisch geformte Sitz und die Fußstützen bieten optimalen Sitz- und Liegekomfort. Die vorderen Scheibenräder erleichtern entscheidend das Verfahren, besonders unter Last. Der Ravello ist einfach zu handhaben und dank abwaschbarer Sitzbezüge absolut pflegeleicht. So eignet er sich bestens als Pflegestuhl.

#### Das Basis-Modell im Pflegealltag

Durch die einfache Bedienung der Rückenlehne lässt sich der ergonomisch geformte Sitz in eine 43°-Liegeposition neigen und erhöht damit den Komfort für den Pflegebedürftigen.

#### Mit oder ohne „S“?

Der Ravello verfügt über 2 unterschiedliche große Laufrollen, bei denen die hinteren Rollen als feststellbare Lenkrollen dienen. Natürlich ist der Ravello auch als S-Modell erhältlich. Bei diesem Modell wird das Manövrieren durch die 4 lenkbaren Rollen erleichtert (große Abbildung).

### Details



Ravello-Sano: Die Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden



Ravello-Curo: Die fest installierte, in der Länge verstellbare Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit



Höhenverstellung der Armlehnen in 6 Stufen



Ravello-Sano und Ravello-Curo sind beide mit der S-Variante für ein leichteres Manövrieren erhältlich

# Pflegestuhl **Ravello-Sano** und **Ravello-Curo**

## Ausführung

- Rückenlehne: Höhe: 810 mm, 43° neigbar
- Fußstütze: 260 x 240 mm, stahlrohrverstärkter Kunststoff, Bodenfreiheit 80 mm, kippicher, rutschhemmende Oberfläche
- Rollen:  
vordere Rollen: Ø 200 mm, feststehend  
hintere Rollen: Ø 150 mm, drehbar, paarweise feststellbar
- Rollen S-Variante:  
vordere Rollen: Ø 150 mm, drehbar, paarweise feststellbar  
hintere Rollen: Ø 150 mm, drehbar, paarweise feststellbar
- Sitzfläche: PU-Schaum mit Holzkern, Raumgewicht 50 kg/m<sup>3</sup>, Stärke 80 mm
- Rückenlehne: PU-Schaum mit Stahlkern, anatomisch geformt, Kopfstütze mit verstellbarem Nackenkissen
- Bezugstoff: Kunstleder, Sitz genäht und geklebt, vollständig wasserabweisend



Technische Änderungen vorbehalten, Stand 11/2015, Version 3, Artikel-Nr. 600201.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Seitenstützen



Speziell kopffixierende Stütze



Urinbeutelhalter



Aufsteckbarer Tisch



Infusionsständer

## Bestellnummern und Außenmaße

- 30.6439.1 Pflegestuhl **Ravello-Curo**, Gesamtbreite: 680 mm, Gesamthöhe: 1260 mm, Gesamttiefe: 1030 mm, Sitzfläche: 520 x 520 mm
- 30.6439.2 Pflegestuhl **Ravello-Sano**, Gesamtbreite: 680 mm, Gesamthöhe: 1260 mm, Gesamttiefe: 1030 mm, Sitzfläche: 520 x 520 mm

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)



# Nachttische

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Überzeugend funktional –  
Nachttische von Burmeier

## Nachttisch Cherusker



Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte. Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 87 cm  
Breite: 52 cm  
Gesamttiefe: 50 cm  
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm  
Bett-Tischplatte von 82-112 cm höhenverstellbar  
Doppelaufrollen Ø 50 mm



## Nachtisch Arminius



Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte. Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 89 cm  
Breite: 54,5 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



## Nachtisch Hermann mit Bett-Tischplatte



Mit ausklappbarer Bett-Tischplatte. Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 89 cm  
Breite: 55 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 119,5 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 4 Rollen feststellbar



## Nachtisch Hermann ohne Bett-Tischplatte



Ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 89 cm  
Breite: 44,5 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm

## Nachttisch Varus



Ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet,  
in 4 Dekoren lieferbar: Buche, Ahorn, Havanna, Bella Noce.

**Technische Daten:**

Höhe: 57 cm  
Breite: 54 cm  
Gesamttiefe: 45 cm  
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 11/2015, Version 2, Artikel-Nr. 600294.

## Bett- und Beistelltisch Duo



Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer  
Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 81 cm  
Breite: 81 cm  
Gesamttiefe: 42 cm  
Bett-Tischplatte von 80-113 cm höhenverstellbar,  
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar

## Bett- und Beistelltisch Solo



Mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer  
Bett-Tischplatte, Buche Dekor.

**Technische Daten:**

Höhe: 81 cm  
Breite: 60 cm  
Gesamttiefe: 42 cm  
Bett-Tischplatte von 80-113 cm höhenverstellbar  
Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar

# Kastenmöbel

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Flexibilität und Funktionalität –  
Kastenmöbel von Burmeier

# Kleider-/Wäscheschränke und Schrankaufsätze



Kleider-/Wäscheschränke für eine Person\*


### Sicherheit

Das Möbelsystem **Adrano** bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten für Wertgegenstände. Auf Wunsch können alle Schränke mit Schließsystemen ausgestattet werden. Die Wertfächer können fest montiert werden.


### Kombinationsmöglichkeit

Durch die Vielzahl von Einzelmöbeln können individuelle Schrankkombinationen gestaltet werden.


### Kleider-/Wäscheschränke für eine Person\*

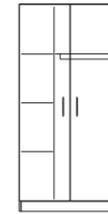


Material-Nr.: 241740  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm

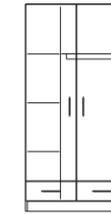

Material-Nr.: 241741  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 2 Sockelschubkästen

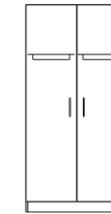

Material-Nr.: 241747  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm

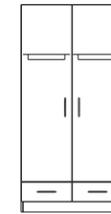

Material-Nr.: 241748  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 2 Sockelschubkästen

### Erweiterungselemente



Material-Nr.: 241738  
**Technische Daten:**  
 Breite: 50 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm



Material-Nr.: 241739  
**Technische Daten:**  
 Breite: 50 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 1 Sockelschubkasten

### Aufsätze



Material-Nr.: 241754  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 42 cm  
 Tiefe: 60 cm




Material-Nr.: 241755  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 42 cm  
 Tiefe: 60 cm

# Kleider-/Wäscheschränke und Zubehör




Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen\*

### Kombinationsbeispiele

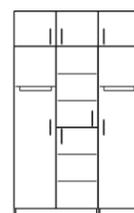


Kombination aus 241749 & 241755  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 244 cm  
 Tiefe: 60 cm

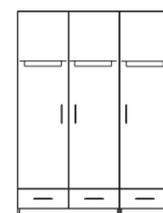

Kombination aus 241748 & 241739  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 244 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 3 Sockelschubkästen


### Kleider-/Wäscheschränke für eine Person\*

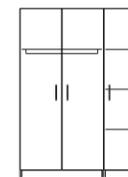


Material-Nr.: 241742  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm



Material-Nr.: 241743  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 3 Sockelschubkästen

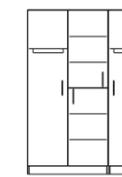


Material-Nr.: 241749  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm

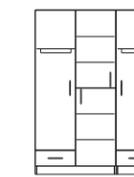

Material-Nr.: 241750  
**Technische Daten:**  
 Breite: 150 cm  
 Höhe: 202 cm  
 Tiefe: 60 cm  
 mit 2 Sockelschubkästen

### Zubehör

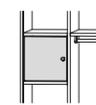

Holzwertfach

Kunststoffwertfach (ohne Abbildung)

### Garderobe



Material-Nr.: 197373  
**Technische Daten:**  
 Breite: 50 cm  
 Höhe: 103 cm

### Spiegel



Material-Nr.: 197372  
**Technische Daten:**  
 Breite: 50 cm  
 Höhe: 103 cm

### Kombination Spiegel/Garderobe



Material-Nr.: 197374  
**Technische Daten:**  
 Breite: 100 cm  
 Höhe: 150 cm  
 Tiefe: 22 cm

\*Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.



### Flexibilität und Funktionalität


Das Möbelsystem Adrano enthält die klassischen Einzellösungen. Somit ist es möglich, individuelle Einrichtungswünsche auf die jeweilige Raumsituation auszurichten und anzupassen. Dabei entspricht Adrano nicht nur den hohen Ansprüchen an ein wohnliches Ambiente, sondern zudem den oft noch höheren Ansprüchen an Funktionalität.

### Langlebigkeit

Mit modernsten Fertigungsanlagen und aus hochwertigen Materialien wird das gesamte Möbelsystem hergestellt. So verfügen beispielsweise die Rückwände über eine Wandstärke von 8 mm. Zum Schutz vor Feuchtigkeit verfügt das Möbelsystem über wischfeste Sockel. Deren Unterseiten werden zusätzlich mit einer ABS-Kante geschützt.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 12/2016. Version 3. Artikel-Nr. 600504.


Anrichten

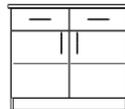

Material-Nr.: 241634\*

#### Technische Daten:


Breite: 100 cm  
Höhe: 90 cm  
Tiefe: 52 cm  
mit 2 Schubkästen

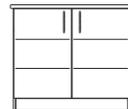

Material-Nr.: 241661\*

#### Technische Daten:


Breite: 100 cm  
Höhe: 90 cm  
Tiefe: 52 cm

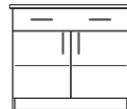

Material-Nr.: 241662\*

#### Technische Daten:


Breite: 100 cm  
Höhe: 90 cm  
Tiefe: 52 cm  
mit 1 Schubkasten

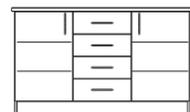

Material-Nr.: 241663\*

#### Technische Daten:

Breite: 150 cm  
Höhe: 90 cm  
Tiefe: 52 cm  
mit 4 Schubkästen

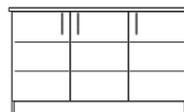

Material-Nr.: 241664\*

#### Technische Daten:

Breite: 150 cm  
Höhe: 90 cm  
Tiefe: 52 cm

\*Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.





**Stapelstuhl**  
(B: 46 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



**Stapel-Armlehnstuhl**  
(B: 56 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



**Mittel-Hochlehnstuhl**  
(B: 60 cm, H: 91 cm, T: 58 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



**Hochlehnstuhl**  
(B: 60 cm, H: 104 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



**Sessel**  
(B: 57 cm, H: 94 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm)



**Hochlehn-Sessel**  
(B: 57 cm, H: 110 cm, T: 59 cm, Sitzhöhe: 45 cm)

Zusatzausstattung für Sitzmöbel: Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter

## Dekore



**Buche Natur**  
R 24010 VV (früher: R 5311 VV)



**Königsahorn**  
R 27001 VV (früher: R 5184 VV)



**Kirsche Edel**  
R 42002 VV (früher: R 5360 VV)



**Kirsche Havanna**  
R 42006 VV (früher: R 5681 VV)



**Bella Noce Schoko**  
R 30019 VV (früher: R 4889 VV)



**Magnolia**  
U 11509 VV

## Beispielmodelle



**Säulentisch**



**Speisetisch, eckig**  
(verschiedene Maße lieferbar)



**Garderobe**  
(B: 50 cm, T: 103 cm)



**Spiegel**  
(B: 50 cm, T: 103 cm)

Zusatzausstattung für Tische: Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter

# Hilfsmittel-Nummern

Modell-Nummern	Hilfsmittel	Benennung	< Produktgruppe 19 > Krankenpflegeartikel	< Produktgruppe 50 > Pflegehilfsmittel	
51.3431.33	S	Pflegebett	Arminia II	19.40.01.3103	50.45.01.1103
51.3431.33	O	Pflegebett	Arminia II	19.40.01.3130	50.45.01.1143
51.3424.33		Pflegebett	Arminia II 24 Volt	19.40.01.3163	50.45.01.1182
51.3431.33		Pflegebett	Arminia III	19.40.01.3254	50.45.01.1291
51.3424.33		Pflegebett	Arminia III 24 Volt	19.40.01.3253	50.45.01.1290
51.5024.33		Pflegebett	Allura	19.40.01.7010	50.45.01.3010
51.5524.33		Pflegebett	Allura 100	19.40.01.7012	50.45.01.3012
51.5724.33		Pflegebett	Allura-Mighty	19.40.01.7011	50.45.01.3011
51.5024.33		Pflegebett	Allura II	19.40.01.7016	50.45.01.3016
51.5524.33		Pflegebett	Allura II 100	19.40.01.7017	50.45.01.3017
51.5724.33		Pflegebett	Allura II 120	19.40.01.7018	50.45.01.3018
51.0604.33	S	Pflegebett	Dali Holz	19.40.01.3126	50.45.01.1137
15.0604.11	S	Pflegebett	Dali Metall	19.40.01.3127	50.45.01.1138
51.0604.33	O	Pflegebett	Dali Holz	19.40.01.3134	50.45.01.1147
15.0604.11	O	Pflegebett	Dali Metall	19.40.01.3135	50.45.01.1148
51.0624.33	S	Pflegebett	Dali 24 Volt Holz	19.40.01.3160	50.45.01.1179
15.0624.11	S	Pflegebett	Dali 24 Volt Metall	19.40.01.3165	50.45.01.1185
51.0604.33		Pflegebett	Dali II Holz	19.40.01.3242	50.45.01.1279
15.0604.11		Pflegebett	Dali II Metall	19.40.01.3241	50.45.01.1278
51.0624.33		Pflegebett	Dali II 24 Volt Holz	19.40.01.3244	50.45.01.1281
15.0624.11		Pflegebett	Dali II 24 Volt Metall	19.40.01.3243	50.45.01.1280
51.0704.33	S	Pflegebett	Dali Economic Holz	19.40.01.3167	50.45.01.1189
15.0704.11	S	Pflegebett	Dali Economic Metall	19.40.01.3168	50.45.01.1190
51.0824.23		Pflegebett	Dali-Wash	19.40.01.3272	50.45.01.1310
51.0714.33		Pflegebett	Economic II	19.40.01.3255	50.45.01.1292
51.0504.33	S	Pflegebett	Fortuna Holz	19.40.01.3110	50.45.01.1115
15.0504.11	S	Pflegebett	Fortuna Metall	19.40.01.3111	50.45.01.1116
51.0504.33	O	Pflegebett	Fortuna Holz	19.40.01.3132	50.45.01.1145
15.0504.11	O	Pflegebett	Fortuna Metall	19.40.01.3133	50.45.01.1146
51.0524.33		Pflegebett	Fortuna 24 Volt Holz	19.40.01.3161	50.45.01.1180
15.0524.11		Pflegebett	Fortuna 24 Volt Metall	19.40.01.3162	50.45.01.1181
51.0504.33		Pflegebett	Fortuna II Holz	19.40.01.3252	50.45.01.1289
15.0504.11		Pflegebett	Fortuna II Metall	19.40.01.3252	50.45.01.1289
51.0524.33		Pflegebett	Fortuna II 24 Volt Holz	19.40.01.3251	50.45.01.1288
15.0524.11		Pflegebett	Fortuna II 24 Volt Metall	19.40.01.3251	50.45.01.1288

Modell-Nummern	Hilfsmittel	Benennung	< Produktgruppe 19 > Krankenpflegeartikel	< Produktgruppe 50 > Pflegehilfsmittel	
59.6631.1	S	Pflegebett	Gigant	19.40.01.7003	50.45.01.3003
30.9356.x		Pflegebett	Lippe III	19.40.03.0020	50.45.03.0020
30.9456.x		Pflegebett	Lippe IV	19.40.03.0026	50.45.03.0026
30.9956.12		Pflegebett	Lippe 120	19.40.03.4003	50.45.03.4003
30.9956.14		Pflegebett	Lippe 140	19.40.03.4004	50.45.03.4004
70.2200.92		Pflegebett	Vertica homecare	19.40.01.8002	50.45.01.4002
51.2431.11	S	Pflegebett	Westfalia III	19.40.01.3104	50.45.01.1104
51.2431.11	O	Pflegebett	Westfalia III	19.40.01.3131	50.45.01.1144
51.2434.11	S	Pflegebett	Westfalia Reha 24 Volt	19.40.01.3158	50.45.01.1177
51.2434.11	S	Pflegebett	Westfalia III 24 Volt	19.40.01.3159	50.45.01.1178
50.5431.1		Pflegebett	Westfalia-Klassik	19.40.01.3157	50.45.01.1176
58.1820.10		Kinderbett	Wickie	19.40.01.6196	50.45.01.2196
61.1612.33		Nachttisch	Modell Arminius	-	50.45.04.1010
60.1612.1		Nachttisch	Modell Cherusker	-	50.45.04.1009
30.9190.1		Beistelltisch	Modell Alwina	-	50.45.04.0008
30.8191.1		Beistelltisch	Modell Solo	-	50.45.04.0013
30.8190.2		Beistelltisch	Modell Theutus	-	50.45.04.0009
30.9191.2		Beistelltisch	Modell Duo	-	50.45.04.0014
19.1400.1		Zubehör	Aufrichter	19.40.02.2006	50.45.02.2006
30.9153.1		Zubehör	Seitenschutz Lippe	19.40.02.4023	50.45.02.4022

S: Pflegebett mit Sperreinrichtung O: Pflegebett ohne Sperreinrichtung

Stand 12/2016



Produkte mit Herz und Verstand  
Products with heart and mind

**Finland / Suomi**

Stieglmeyer Oy  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
E-Mail [stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)  
[finland.stieglmeyer.com](http://finland.stieglmeyer.com)

**Netherlands / Nederland**

Stieglmeyer BV  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
E-Mail [info@stieglmeyer.nl](mailto:info@stieglmeyer.nl)  
[netherlands.stieglmeyer.com](http://netherlands.stieglmeyer.com)

**Poland / Polska**

Stieglmeyer Sp. z o.o.  
86-212 Stolno, Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
E-Mail [info.stolno@stieglmeyer.pl](mailto:info.stolno@stieglmeyer.pl)  
[poland.stieglmeyer.com](http://poland.stieglmeyer.com)

**France**

Stieglmeyer SAS  
Bâtiment B  
27 chemin des Peupliers  
69572 Dardilly  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
E-Mail [contact@stieglmeyer.fr](mailto:contact@stieglmeyer.fr)  
[france.stieglmeyer.com](http://france.stieglmeyer.com)

**South Africa**

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd  
The Estuaries, Century City, Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
E-Mail [info.southafrica@stieglmeyer.com](mailto:info.southafrica@stieglmeyer.com)  
[south-africa.stieglmeyer.com](http://south-africa.stieglmeyer.com)

Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 10/2018. Version 9b. Artikel-Nr. 600850.  
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 10/2018. Version 9b. Item no. 600850.

Finden Sie Ihren Händler auf unserer Webseite:  
Find your local partner at our website:  
[stieglmeyer.com/partner](http://stieglmeyer.com/partner)

**Burmeier GmbH & Co. KG**

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage, Germany  
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)  
[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)

  
**BURMEIER**  
Stieglmeyer-Group